

Dauerbinde KÒ- Kraftig, langt stræk



Bind med polyuretan-kædetråde. Holder kompressionen som kan doseres efter behov.

Produktet:

Elastisk bind af 86% bomuld, viskose og elasthan. Kan strækkes ca. 180%. Bevarer elasticiteten.

Materialet er luftgennemtrængeligt og holdbart. Er modstandsdygtigt over for sårsekreter, salver og sved.

Kan vaskes, koges og steriliseres (Autoklav 121° C).

Daurbinde K indeholder ikke Latex

Lohmann & Rauscher A/S

Gøngehusvej 252

DK-2950 Vedbæk

Tlf. 45 89 02 25

Fax 45 89 02 29

Mail: info@dk.LRmed.com

Anvendelsesområde:

Dauerbinde K har på grund af det lange stræk en kompressionsvirkning, som kan doseres efter behov.

Bindet er derfor særlig velegnet til støtte og aflastning ved distorsioner, kontusioner og luksationer i traumatologien og sportsmedicinen.

Anvendes også til kompression af ekstremiteter (benlidelser, thromboseprofylakse).

Dauerbinde K kan ikke blive siddende natten over, da bindet arbejder når benet ligger stille. Dauerbinde K fungerer som pumpe hele tiden også når patienten sidder eller ligger stille.

Dauerbinde K kan anvendes flere gange, det kan ikke siges præcist hvor mange gange, da det kommer an på behandlingen af bindet.

Sortiment:

Dauerbinde K

7 m strakt længde, med forbindelsesklemmer, enkeltvis indpakket
Æsker á 10 stk. art.

6 cm 22000

8 cm 22001

10 cm 22002

12 cm 22003

20 cm 22004

hospitalspakning

6 cm 22020

8 cm 22021

10 cm 22022

12 cm 22023

14 m strakt længde,

10 cm 22007

12 cm 22008