

Produktdatablad

inlay




heel up® er Levabo®'s nye hygiejniske og miljøvenlige oppustelige en-patient produkter. Sortimentet er udviklet i samarbejde med ledende sårsygeplejersker og sikrer optimal komfort og hygiejne i behandling og forebyggelse af tryksår.



Dansk udviklet
Dansk produceret
CE godkendt

Den trykreducerende hæleløfter

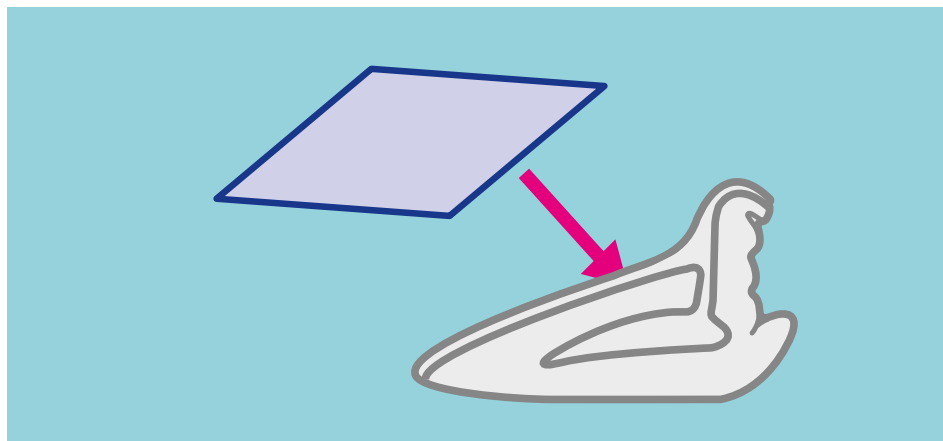

Levabo's
produkter
fylder minimalt
på depotet

Produkt beskrivelse

Ved risiko for tilsmudsning af puden fra sår, og/eller ved patienter med høj svedtendens, kan Heel up inlay anvendes som et ekstra beskyttende lag på puden.

Heel up inlay placeres på pudens overside med stofsiden mod patientens hud.

Heel up inlay kan evt. klippes i facon med en saks for at tilpasse formen således at der opnåes den bedste beskyttelse i forhold til placering af evt. sår og cirkulering af luft.

Egenskaber/Fordele



- Designet til behandling og forebyggelse af tryksår på hælen.
- Produkterne er multifunktionelle, dvs. at det samme produkt kan anvendes i forskellige aflastningssituationer, så tryksårforebyggelse og behandling udføres optimalt.
- En-patient-brug sikrer høj hygiejne.
- Enkel håndtering. all up® pustes op før brug og justeres til den enkelte brugers anatomi og behov.
- God komfort, blødt, hudvenligt, fugtabsorberende og varmetransporterende materiale.
- Produkterne overflødiggor håndtering i et genbrugsdepot og frigør behandlingsressourcer.
- Leveres i ren, forseglet flad forpakning inkl. oppustningsdevice.
- Testet og godkendt iht. ISO 10993-10:2010, test for irritation og overfølsomhed.

Produktnavn	Pudestørrelse	Pakning	Varenummer	HMI Nummer
Heel Up Inlay	35 x 50 cm.	5/10 stk.	76015	N/A

heel up® & all up® Pat. Pending. Er udviklet og produceret i Danmark af Levabo ApS. Produkterne er CE godkendt. Ret til ændringer forbeholdes.

Levabo ApS
Højlundsparken 49
8355 Solbjerg

info@levabo.dk
www.levabo.dk