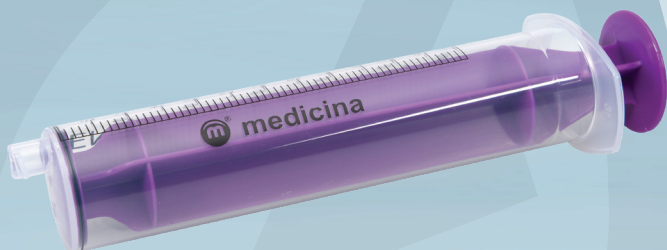


Varenummer 1000003235

Ernæringssprøjte, Medicina, 60 ml, ENFit, flergangs**Produktbeskrivelse**

Medicina steril enteral sprøjte med stempelstop til indgift af ernæring eller medicin. Ernæringssprøjten kan vaskes og anvendes flere gange. Indeholder hverken PVC eller ftalater. Hver sprøjte er steril pakket.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Ernæringssprøjte
Varemærke	Medicina
Features	ENFit, flergangs
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	PP
Rumindhold, netto	60 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sygesikringsgruppe	6
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	7 dage
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Sprøjten rengøres straks efter brug. Kom sprøjten i varmt sæbevand. Sprøjten rengøres indvendigt ved at trække stemplet ind og ud indtil alle spor af ernæring eller medicin er væk. Adskil sprøjte og stempel og rengør omhyggeligt i varmt sæbevand. Skyl sprøjte og stempel i rindende vand. Ryst overflødig vand af. Tør med ren køkkenrulle (brug ikke viskestykke/klud). Sprøjte og stempel (stadig adskilt) opbevares i en ren og tør beholder med låget påsat. Anvend ikke rengøring i opvaskemaskine, da det forkorter levetiden af sprøjterne.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	240 stk	44 cm	43 cm	39 cm	45060278508199
pk	60 stk	42 cm	21.2 cm	19 cm	25060278508195
stk	1 stk				5060278508191



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

