

Mic-Key sortimentet er kommet i ny emballage

Nye Forlængerslange med ENFit

Sådan giver du medicin



Brug musen til at gå direkte til afsnittene

Sådan giver du sondemad

Opdateret Mic-Key Brochure

Mic-Key sortimentet er kommet i ny emballage

Ændringen fra Kimberly-Clark til Halyard Health Care har fået betydning for Mic-Key pakningernes udseende. Siden november 2015 er alle Halyards produktpakninger blevet udskiftet med det nye navn og design, og kommer nu i nye pakninger. Der er kun tale om navne- og farveændringer, så genkendeligheden forbliver intakt.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at ændringerne **ikke** har indflydelse på selve produkterne og varenumrene forbliver de samme.

Gammel Mic-Key pakning



Ny Mic-Key pakning



Nye Forlængerslange med ENFit

I er ligeledes begyndt at modtage de nye forbedrede forlængerslanger med ENFit samt Mic-Key sæt indeholdende forlængerslanger med ENFit og en sprøjte med ENFit



Uden ENFit

Y-forlængerslanger (vinklet)



Med ENFit



Uden ENFit

Bolus-forlængerslanger (lige)



Med ENFit


Vi er klar over, at det kan give nogle udfordringer i den daglige brug, at alle pakninger nu bliver leveret med ENFit forlængerslanger. Derfor får I her et par gode råd, som kan lette arbejdet:

Sådan giver du medicin

Du skal bruge et strå og en sprøjte

1. Skru strået på sprøjten
2. Træk medicinen op i sprøjten
3. Tag strået af sprøjten
4. Tør studsens på sprøjten af
5. Giv medicinen
6. Skyl med vand, som du plejer, i både sprøjte, strå og i Mic-Key sonden

Skal du give medicin flere gange dagligt, kan du sætte en prop på og gemme medicinen.

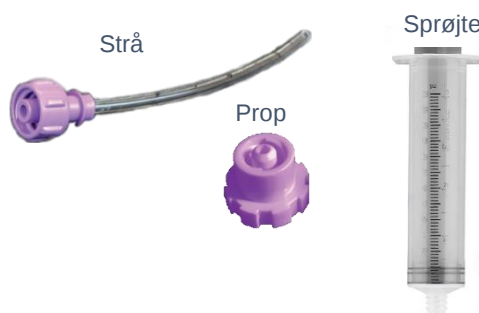

- Skyl forlængerslange/sonde godt igennem
- Giv ordineret medicin
- Skyl forlængerslange/sonde igen
- NB! Giv altid kun ét lægemiddel ad gangen

Sådan giver du sondemad

Sådan giver du sondemad gennem din Mic-Key med ENFit sprøjte:

- Sæt sprøjten fast på Bolus forlængerslange med ENFit – tryk let, og drej med uret.



Forlængerslangerne må ikke koges,
da det ødelægger propperne.

Så skyl dem godt igennem
- og du kan, om nødvendigt, skolde dem hurtigt.

Opdateret Mic-Key Brochure

Vi har opdateret Mic-Key brochuren – du kan downloade den [her](#) eller få den tilsendt af din Abena konsulent.

Husk, at I altid kan holde jer opdaterede på Mic-keys hjemmeside www.mic-Key.dk

Med venlig hilsen

Abena Health Care

