

Rengøringsvejledning til Bivona® inderkanyler



Må ej lægges i blød.

- Inderkanylen skal altid tages ud af tracheostomikanylen inden rengøring
- Anvend de specielle rengøringsvatpinde (artikelnummer BICSWB) fugtet med sterilt vand eller saltvand
- Rens forsigtigt inderkanylens indre lumen for slim og sekret ved en drejende bevægelse med en rengøringsvatpind. Anvend ny rengøringsvatpind ved hver rengøring.
- Skulle inderkanylen få et knæk eller anden beskadigelse, må den ikke genanvendes og skal udskiftes.
- Inderkanylen skal lufttørre inden genindsættelse

***Kan rengøres op til 400 gange og må anvendes i max. 29 dage.
Må ikke re-steriliseres eller rengøres ved nogen anden metode
(f.eks. autoklave eller opvaskemaskine).***