



Varenummer 1000010529

Kontrol, Hb, QuikRead Go, 1 ml, til 10 µl
kapillærrør, kølevare



Produktbeskrivelse

HB Control er påtænkt til kvalitetskontrol af HB analysen af Quikread go instrument,. Anvend kontrollen på samme måde som en ukendt fuldblodsprøve. Kontrollen er klar til brug, skal stabiliseres ved stuetemperatur i min. 30 minutter, blandes grundigt men ikke rystes. Holdbar uåbnet indtil udløbsdato hvis den opbevares ved 2 - 8 grader celsius. Holdbar åbnet 1 måned hvis den opbevares ved 2 - 8 grader celsius. Kontrollen stammer fra kvæg og skal behandles på samme måde som en patientprøve. Resultatet bør være inden for området, vist på kontrolflaskens etikette. Kontrollen udføres på samme måde som patienttest. Der anvendes 10 µl prøvemateriale



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kontrol
Varemærke	QuikRead
Vareserie	Go
Features	Til 10 µl kapillærrør, kølevare
Rumindhold, netto	1 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Temperatur Tolerance	+2° C til +8° C
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	3.5 cm	3.5 cm	7 cm	6438115001522



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet skal opbevares køligt.