



Varenummer 1000021288



Tapeble, ABENA Slip Premium, L0, grøn farvekode

- ✓ Effektiv kerne med Top-Dry teknologi
- ✓ 360° lækagebarrierer, der forhindrer lækage hele vejen rundt
- ✓ Formede benelastikker bidrager til optimal pasform
- ✓ Vådindikator med gradueringsskala
- ✓ 100 % åndbarhed understøtter en sund hud
- ✓ Odor Control minimerer ubehagelige lugtgener
- ✓ Svanemærket og dermatologisk testet



Produktbeskrivelse

ABENA Slip er vores førsteklases serie af fuldt åndbare, anatomisk formede tapebleer udviklet til brug ved moderat til svær inkontinens. Den effektive kerne med Top-Dry teknologi sikrer hurtig absorption og tør overflade, selv efter gentagne vandladninger. En kombination af forskellige barrierer (synlige og usynlige) og elastiske benudskæringer giver en 360° lækagebeskyttelse. Kombinationen af disse funktionaliteter hjælper med at beskytte huden og opretholde en naturlig hudbalance. Odor Control systemet minimerer risikoen for lugtgener. Den fleksible kombitape af høj kvalitet med dobbelt tapefunktion sikrer optimal pasform og nem omplacering. Vådindikatoren med gradueringsskala hjælper brugeren og plejepersonalet med at finde produktet med det rette absorptionsniveau og det rette tidspunkt for produktskift. De dermatologisk testede produkter bærer Svanemærket.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tapeble
Varemærke	ABENA
Vareserie	Slip Premium
Størrelse	L0
Farve	Hvid
Features	Grøn farvekode
Materiale	ECF fluff, elasticated combi tape, PE, åndbar bagfolie, elastan, nonwoven, PP, resin, SAP
Længde/dybde	970 mm
Bredde	800 mm
Hoftevidde	100-150 cm
Tolerance	+/- 10%
Absorptionsevne	2000 ml
Køn	Unisex
Inkontinensgrad	Moderat
Certifikater	CE. Svanemærket. MD. UKCA.
Svanemærket licensnr.	5023 0001
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Tapeble til moderat til svær inkontinens designet til særligt krævende situationer og sengeliggende brugere. Serien er forsynet med et logisk tal-/bogstavsystem og en farvekodning, som gør det let at skelne mellem de forskellige størrelser og sugeevner. Det er vigtigt altid at måle hoftestørrelsen for at vælge den rigtige størrelse og vælge den korrekte sugeevne for at undgå lækager. Fold bleen på langs med bagsiden vendt udad. Før bleen forfra og bagud. Bred den forreste del af bleen ud, så der opstår en skålform mellem benene. Fastgør den nederste tape i begge sider med en let opadgående vinkel og fastgør dernæst den øverste tape med en nedadgående vinkel for at opnå en sikker og behagelig pasform. Produktet kan påsættes, når bruger er stående (også selvhjulpen) eller liggende. Se vores påsætningsvejledning for yderligere information.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	4 pk	60 cm	40 cm	36.7 cm	5713571000199
pk	26 stk	37 cm	17.5 cm	29 cm	5713571000182



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandards og lovgivning i Storbritannien.



Lækagebarrierer i benudskæringen og omkring den absorberende kerne beskytter mod lækage og giver en optimal pasform.



Symbolet Dermatologisk testet garanterer, at produkterne er blevet testet for potentielle hudirriterende stoffer af et uafhængigt tredjepartslaboratorie.



Produktet er forsynet med elastiske tapestykker, der sikrer den bedste kombination af komfort, pasform og lækagebeskyttelse. Tapestrykkernes blå klæbeflader muliggør omplacering ad flere omgange.



Den højtydende kernes unikke struktur er designet til hurtig fordeling og indkapsling af urin, hvilket sikrer en tør overflade – også ved gentagne vandladninger.



Lugtkontrol er en vigtig faktor for at sikre brugeren diskretion. ABENAs inkontinensprodukter er designet og udviklet til at holde lugten fra produktet på et absolut minimum.



Produktet er fuldt åndbart, hvilket gør det behageligt og hudvenligt at anvende – også over tid.



Vådindikatoren er en væskefølsom strimmel, som skifter farve eller flyder ud, hvilket indikerer, hvor stor en del af produktet, der er udnyttet.



En kombination af 100% åndbarhed, Top-Dry og lækagebarrierer giver en tør overflade og sund hud, selv efter gentagne vandladninger, hvorved hudens naturlige pH-balance opretholdes.



Produktet indeholder ikke latex.



Dråbesystem, som viser produktets sugesevne. Jo flere dråber jo højere sugesevne. Produkterne kan have fra 1-9 dråber.



Unik Top-Dry teknologi som sørger for hurtig absorption og tør overflade, selv efter gentagne vandladninger.



Poser med dette symbol er fremstillet af mindst 60% PCR-plast (post-consumer recycled), dvs. plastmaterialer, der tidligere har været brugt af forbrugere. Således kan vi reducere vores plastaffald og være med til at passe på miljøet.

