



Varenummer 1000027524



Åben ble, ABENA San Basic, 9, grøn farvekode

- ✓ Tekstillignende bagside: gør bleen ekstra behagelig og åndbar
- ✓ Lækagebarrierer giver ekstra beskyttelse
- ✓ Effektiv kerne-teknologi giver hurtig absorption
- ✓ Anatomisk formet for bedre pasform
- ✓ Vådindikator
- ✓ Odor Control system sikrer mod lugtgener fra produktet



Produktbeskrivelse

ABENA San Basic er vores serie af anatomisk formede bleer med tekstillignende, åndbar bagside, der sikre diskret beskyttelse og komfort ved moderat til svær inkontinens. De anatomisk formede bleer har en fremragende pasform, som giver fri bevægelighed. Den effektive kerne giver hurtig absorption og tør overflade, selv efter gentagne vandladninger. Alle produkter er forsynet med lækagebarrierer, der yder ekstra beskyttelse, og Odor Control systemet minimerer risikoen for ubehagelige lugtgener. Vådindikatoren bliver blå, når produktet er vådt, hvilket angiver det rette tidspunkt for skift.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Åben ble
Varemærke	ABENA
Vareserie	San Basic
Størrelse	9
Farve	Hvid
Features	Grøn farvekode
Materiale	ECF fluff, PE, åndbar bagfolie, elasthan, nonwoven, PP, resin, SAP
Længde/dybde	73 cm
Bredde	37 cm
Absorptionsevne	2200 ml
Certifikater	CE. MD. UKCA.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Holdbarhed	5 år

Brugsanvisning

Anatomisk formet til moderat til svær inkontinens. ABENA San Basic produkter passer stort set alle brugere, da der ikke skal tages højde for kropsfacon, idet produktet kun fylder mellem benene og ikke omkring mave og hofter. Serien er forsynet med et logisk talsystem og en farvekodning, som gør det let at skelne mellem de forskellige størrelser og sugesevne. ABENA San Basic bør altid bruges med specielt fikseringsundertøj, eksempelvis vores ABENA Fix-produkter. Fikseringstrusserne sikrer, at bleen holdes tæt ind til kroppen, og reducerer risikoen for lækage. Træk fikseringstrusserne op midt på benene. Fold bleen på langs for at skabe en skålform med bagsiden vendt udad. Før bleen mellem benene forfra og bagud. Placer den øverste kant af bleen ved halebenet. Fold bagsiden af bleen vandret ud for at skabe en skålform mellem benene. Brug vådindikatoren til at kontrollere, om produktet er påført nøjagtigt i midten. Fold bleen vandret ud foran. Træk fikseringstrusserne op på plads.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	80 stk	60 cm	40 cm	45.2 cm	5703538509322
pk	20 stk	32.5 cm	20 cm	29.5 cm	5703538509315
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarter og lovgivning i Storbritannien.



Lugtkontrol er en vigtig faktor for at sikre brugeren diskretion. ABENAs inkontinensprodukter er designet og udviklet til at holde lugten fra produktet på et absolut minimum.



Effektive lækagebarrierer, både synlige og ikke-synlige, samt latexfrie elastikker sikrer god pasform, hvilket reducerer risikoen for lækage.



Vådindikatoren er en væskefølsom strimmel, som skifter farve eller flyder ud, hvilket indikerer, hvor stor en del af produktet, der er udnyttet.



Produktet indeholder ikke latex.

