

Varenummer 1000027575

Indikator, Kemiske, til tørvarme, klasse 4, label



Produktbeskrivelse

Den kemiske indikator er fremstillet i henhold til ISO 11140-1 "Sterilisation af instrumenter i Sundhedssektoren" og følger retningslinjerne i NIR for Almen Praksis. Indikatoren anvendes til at monitorere om tør varme kan trænge igennem indpakningen af instrumenterne, der er blevet udsat for sterilisation med tør varme, ved at reagere på to kritiske parametre - tid og temperatur. Den kemiske indikator skal anvendes ved 160 grader C i 2 timer - og det anbefales, at man anvender en kemisk indikator minimum 1 gang dagligt eller når sterilisatoren anvendes. Indikatoren er en label. Farveskiftet vil være fra grøn til brun/sort efter 10 minutter.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Indikator
Features	Til tørvarme, klasse 4, label
Holdbarhed	36 måneder fra produktionsdato
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	1000 stk	15 cm	12 cm	5 cm	
stk	1 stk				