

Renser sår. Støtter sårhelingen.¹

Granudacyn® er en sårskyllevæske, der er sikkert konserveret med HOCl/NaOCl. Den bruges til at rense og fugte kroniske, akutte, kontaminerede sår samt første- og andengradsforbrændinger. **Opløsningen kan også bruges på følsomt væv som brusk, sener, ledbånd og knogler², eller i øret og munden, kirurgiske sår (intraoperative og postoperative) og i fistler.** Dette gør Granudacyn til et egnet produkt til de fleste sårbehandlinger.

Fordele ved Granudacyn

- Understøtter naturlig heling gennem mekanisk rensning og fugtgivning
- Letter den mekaniske fjernelse af mikroorganismer og cellulært affald
- Intet behov for neutralisering eller skylning, kan efterlades i såret
- Vævskompatibel - koncentrationen irriterer ikke såret
- Ikke cytotoxisk og irriterer ikke huden³
- Biokompatibel med positivt nytte/risiko-forhold³
- HOCl/NaOCl fungerer som et konserveringsmiddel, der sikrer mikrobiel renhed⁴
- Reducerer lugt fra såret⁵
- Kan opbevares ved stuetemperatur efter åbning til flergangsbrug i op til 90 dage (gel) og 60 dage (skyllevæske)




Granudacyn®

Vævskompatibel og sikker at anvende.


Mölnlycke®

Anvendelse

Sårskyllevæske og -spray:

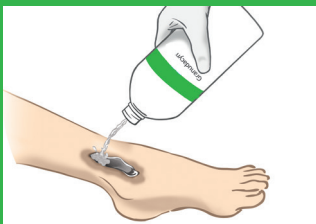


1. Skånsom rensning af sår med Granudacyn skyllevæske.



2A. Spray på det rensede sår fra ca. 15-30 cm afstand.



2B. Skyl direkte i såret og/eller rens med en gennemvæddet kompres efterfølgende.

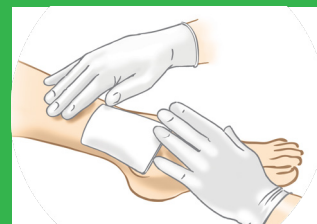


3. Kan bruges i kombination med en standard sårbandage.

Granudacyn kan bruges i forbindelse med NPWT (sårbehandling med negativt tryk).



1. Tag flasken til NPWT ud af æsken.

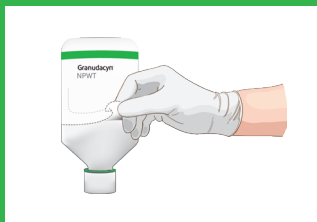

2. Åbn bærehåndtaget fra etiketten og prik hul på flasken.



3. Hæng flasken op i håndtaget på stativet.

Sådan virker Granudacyn®

Granudacyn konserveret med HOCl/NaOCl til flergangsbrug i op til 60 dage (skyllevæske) og 90 dage (gel) efter åbning. Påfør Granudacyn på sårbunden, før den er rengjort. Opløsningen behøver ikke at blive neutraliseret eller fjernet og kan bruges til at fugte bandagen eller selve såret.

Indhold:

Granudacyn sårskyllevæske indeholder vand, natriumklorit, natriumhypoklorit og hypoklorsyre.
Granudacyn sårgel indeholder vand, natriumchlorit, natriumhypochlorit, hypoklorsyre og kolloidalt silikat.

Producent: P.G.F. Industry Solutions GmbH, Austria.

Distributør: Mölnlycke Health Care AB.

CE certifikat: 44 232 160605 (0044 TÜV Nord).

Opbevaring:

Granudacyn sårskyllevæske har en holdbarhed på 30 måneder fra produktion og 60 dage efter åbning (på nær varenummer 360150, der har 18 måneder og 60 dage).

Granudacyn sårgel har en holdbarhed på 24 måneder fra produktion og 90 dage efter åbning.

Granudacyn sårskyllevæske og -gel kan opbevares ved stuetemperatur.

Anvendelsesområder:

- Alle kroniske sår uanset dybde, f.eks. diabetiske fodsår, alle typer bensår og tryksår
- Alle akutte sår, f.eks. snitsår, bidsår, hudflænger og hudafskrabninger
- Operationssår (intra- og postoperativt)
- Sår med blottet brusk, sener, ligamenter eller knogler
- Første- og andengradsforbrændinger
- Sår efter strålebehandling
- Fistler og abscesser
- Hulrum, som f.eks. mund, næse og ører
- Kritisk koloniserede eller inficerede sår
- Skader på blødt væv

Produktsortiment

Produkt	Indhold	Varenr.	Holdbarhed	Stk./trp. krt.
Granudacyn sårskyllevæske	50ml spray	360150	18 måneder	20
	250ml spray	360100	30 måneder	15
	500ml	360101		12
	1000ml	360102		6
	500ml NPWT	360103		12
	1000ml NPWT	360104		6
Granudacyn sårgel	50g	360107	24 måneder	12
	100g spray	360108		12
	250g spray	360106		15

Referencer: 1. Edwards-Jones V, Flanagan M, and Wolcott R. Technological advancements in the fight against antimicrobial resistance. Wounds Int 2015;6(2):47-51. 2. Granudacyn®-Journal of Wound Care Volume 29 No 10 (Suppl 2) October 2020. 3. Severing AL, Rembe JD, Koester V, Stuermer EK. Safety and efficacy profiles of different commercial sodium hypochlorite/hypochlorous acid solutions (NaClO/HClO): antimicrobial efficacy, cytotoxic impact and physicochemical parameters in vitro Journal of Antimicrobial Chemotherapy. Volume 74, Issue 2, February 2019, Pages 365-372. 4. RDS 005-0414, ZLG, Anleitung für die Festlegung von Mindestkriterien zur mikrobiologischen Reinheit von Medizinprodukten. 5. Efficacy and safety of neutralpH superoxidised solution in severe diabetic footinfections-Fermi'n R Marti'nez-De Jesu's, Antonio Ramos-De la Medina, Jose' Mari'aRemes-Troche, David G Armstrong, Stephanie C Wu, Jose Luis Lazaro Martinez, Juan V Benoit-Montesinos-International Wound Journal.

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: +45 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke og Granudacyn navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care Gruppen. © 2024 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKWC2132404




Mölnlycke®