



Varenummer 1000028364

Skumbandage, Mepilex UP, 15x15cm, m/silikonekontaktlag, u/klæb, latexfri, steril, engangs

- ✓ Meget formbart og tyndt design
- ✓ Safetac teknologi - Minimerer smerte og traume ved bandageskift
- ✓ Velegnet til brug under kompression
- ✓ Kan blive siddende i flere dage
- ✓ Frigør begge hænder til applicering af kompressions- eller fikseringsbandage
- ✓ Kan løftes og justeres uden at miste klæbeevnen
- ✓ Høj væskehåndteringsevne uden risiko for lækage



Produktbeskrivelse

Mepilex UP er en tynd, blød og formbar skumbandage med unikke integrerede kanaler på sårkontaktlagsiden. Disse transporterer hurtigt sårsekret vertikalt ind i skumpuden og fordeler væsken jævnt i bandagen. Er specielt velegnet til sår med sårsekret af høj viskositet som fx venøse bensår. Kan anvendes til såvel akutte som kroniske sår i alle stadier. Safetac silikonekontaktlaget minimerer risikoen for maceration af hudomgivelser, og minimerer smerte og traume ved bandageskift. Kan anvendes under kompression. Kan klippes i passende størrelser. Skal fikseres.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Skumbandage
Varemærke	Mepilex
Vareserie	UP
Features	M/silikonekontaktlag, u/klæb, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PUR-skum, PUR-film, safetac silikone
Længde/dybde	15 cm
Bredde	15 cm
Steriliseringstype	ETO
Certifikater	MD. CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes på patienter og/eller brugere med kendt overfølsomhed over for de materialer/ bestanddele, der indgår i produktet. Må ikke anvendes sammen med oxiderende midler såsom hypokloritopløsninger eller brintoverilte. Granudacyn® er dog blevet testet og vurderet til at være sikker at bruge sammen med Mepilex UP. Hvis du ser tegn på klinisk infektion, fx feber, eller hvis såret eller den omkringliggende hud bliver rød, varm eller hævet, skal du kontakte sundhedspersonalet med henblik på passende behandling.
Holdbarhed	36 måneder fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.



Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	25 stk	27.5 cm	24.2 cm	16.4 cm	7333350929992
pk	5 stk	24.3 cm	22.2 cm	3.4 cm	7333350050191
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er kun til engangsbrug.