

Oplev den nye side af Debrisoft® – **Debrisoft® Duo.**

Når jeg gerne vil
gøre det bedre,

debrisoften jeg.



To sider,
to teksturer,
en løsning.

Når det skal være ukompliceret,
debrisofter jeg.



Effektiv 2-i-1 debridering-pad:

- den **originale bløde, hvide side** fjerner urenheder, ekssudat og biofilm fra såret
- den **nye teksturerede beigefarvede side** gør det let at løsne debris og fibrin*

Udviklet på baggrund af brugererfaring, så der opnås en mere effektiv debridering af fast-klæbende, fiberholdig død hud end ved standard mekanisk debridering.

Debrisoft® Duo

Gør din debridering enklere.



1. Fugt

Fugt begge sider af Debrisoft Duo inden brug med saltopløsning eller en opløsning til sårskylning.



2. Tilpas til behovet

Begynd med en af siderne på Debrisoft Duo, afhængig af sårets tilstand, og skift om efter behov.



3. Debrider

Tør med et let tryk henover sår og påvirkede hudomgivelser i 2-4 minutter, indtil avitalt væv og debris er fjernet.



4. Udført

Kasser alle Debrisoft-produkter efter brug.

Når jeg vil have hurtige resultater,
debrisofter jeg.

Debrisoft® Duo 10 x 10 cm

- skabt til debridering af debrís og fibrin og krævende sår
- den teksturerede beige farvede side gør det let at løsne debrís og fibrin
- den bløde, hvide side fjerner urenheder, ekssudat og biofilm fra såret
- du har mulighed for at anvende begge sider, afhængig af sårets tilstand og patientens behov

Debrisoft® Lolly


- til debridering af dybe sår og områder der er svært tilgængelige
- sikker fiksering af fiberhovedet (lav risiko for at hovedet pludselig går løs)
- ideel til kirurgisk invasive sår

Debrisoft® Duo 13 x 20 cm

Skabt på grundlag af brugererfaring:

Yderst effektiv

Absorberer, binder og fjerner urenheder, ekssudat og bakterier. Fjerner 99 % af biofilm*.

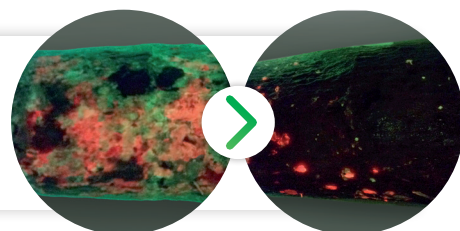

Kilde 1

Let og sikker i brug

Stor tilfredshed hos brugerne, hurtigt synlige resultater inden for 2 - 4 minutter.



Kilde 2

Tilpasning til sårets tilstand og patientens behov

Debrisoft Duo er udviklet til at udføre mere effektiv debridering af debrís og fibrin end ved standard mekanisk debridering.





Debrisoft® produktfamilien

Tre valgmuligheder – en løsning.



Ønsker du at bruge originalen?
Få nyttige vink her ...



Debrisoft® Duo

steril, enkeltvis pakket

Størrelse (cm)	REF	VE
10 x 10	159 990	5/50
13 x 20	159 991	5/50

Debrisoft® Lolly

steril, enkeltvis pakket

REF	VE
33 224	5/50

Se venligst brugsanvisningen.

Kilder:

- 1) Billeder: Fotos anvendt med patientens samtykke, Storbritannien.
- 2) Billeder: Gabriele Stern, ATZ-Stern, Bocholt, Tyskland.

Prøv Debrisoft® Duo nu!
For mere fleksibilitet
i debridering.

