


EyeDrop®


Briller til selvstændig påføring af øjendråber

Price:

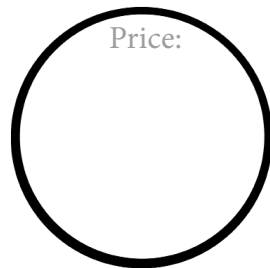

Let at dryppe dine egne øjne

- 100% hygiejnisk.
- Kan administreres med én hånd.
- Passer til alle størrelser øjendråbeflasker.

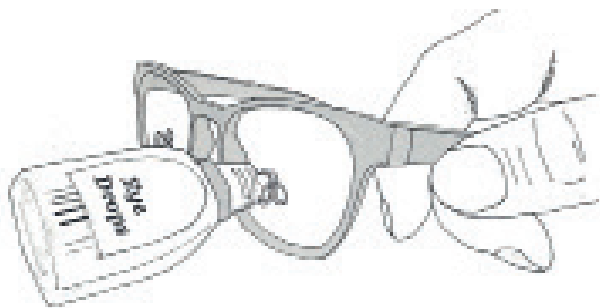

Brugsanvisning

1. Vask dine hænder.
2. Placer flasken i det mest passende hul i brillen.



3. Sæt brillen på.

4. Læn dig tilbage, indtil flasken i det valgte hul er over dit øje.



5. Dryp øjet.

6. Om nødvendigt placér flasken også på den anden side for at dryppe det andet øje.

Bemærk: Brug kun EyeDrop-brillen, når flasken sidder godt fast i brillen og ikke sidder for dybt, så den kommer i kontakt med dit øje. Brillen er heller ikke egnet til Minims-pipetter.