

Varenummer 1000030909

Teststrimler, Diatesse Xper, til måling af ketonstoffer i blod



Produktbeskrivelse

Anvendes til opsamling af blod til måling af ketonstoffer i blodet. 1. Kontrollér udløbsdato *Tjek både teststrimler og kontrolvæske *Kontrolvæske er typisk holdbar 3 måneder efter åbning 2. Klargør apparatet *Vask og tør hænder *Tænd Diatesse-apparatet *Indsæt en teststrimmel (apparatet starter automatisk) 3. Påfør kontrolvæske *Ryst flasken let *Dryp én dråbe kontrolvæske på et rent, ikke-absorberende underlag *Sug dråben op med teststrimlen (dryp aldrig direkte fra flasken på strimlen) 4. Aflæs resultatet *Sammenlign resultatet med kontrolområdet på teststrimmelbeholderen

Specifikationer

Produktbetegnelse	Teststrimler
Varemærke	Diatesse
Vareserie	Xper
Features	Til måling af ketonstoffer i blod
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse B

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	7.6 cm	4.5 cm	4.2 cm	8718692277847
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.