


QuikRead go Plus instrument – Førstegangsoopsætning

Når QuikRead go Plus-instrumentet startes for første gang, vil instrumentet kræve, at I laver et password




- Password: 8 tegn
- Bekræft password : 8 tegn
- Sørg for at gemme denne kode, f.eks. i bunden af instrumentet.

- Vælg set up


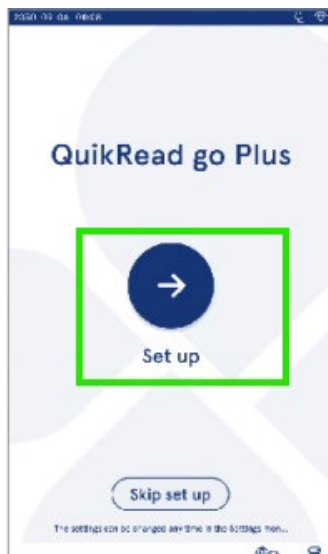


- Vælg settings

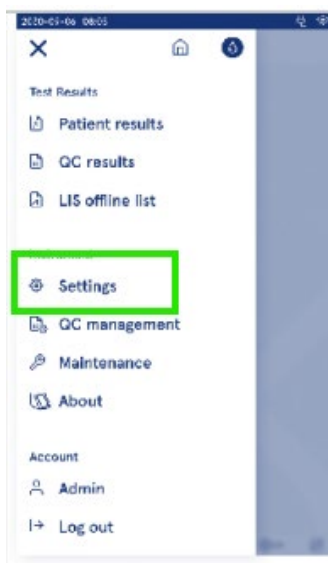

- **Første opsætning**

- Sprog
- Skærm og lyd
- Dato og klokkeslæt
- Strømbesparelse
- Måling – ændring af måleenhed for Hb
 - Vælg wrCRP+Hb

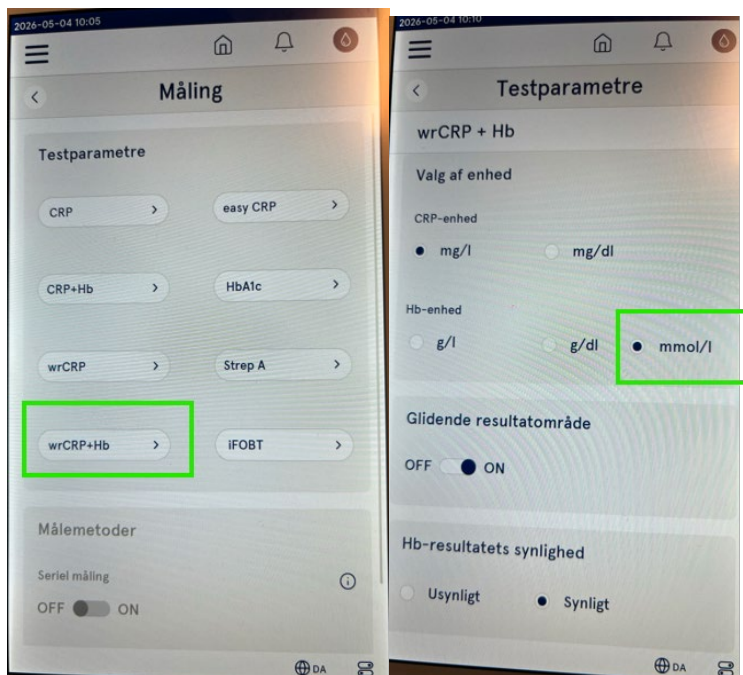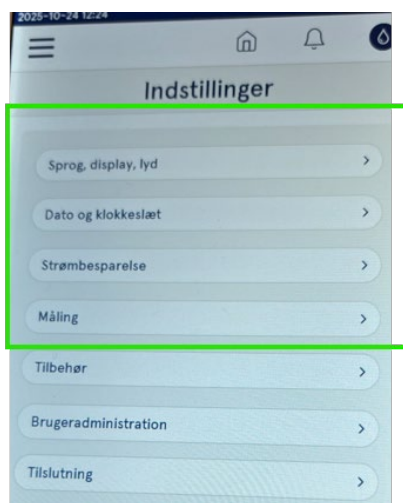

Jeres QuikRead go Plus-instrument har nu gemt jeres valg permanent og er klar til brug.

Ønsker I på et senere tidspunkt at ændre nogle indstillinger, skal I være opmærksomme på, at det kræver, at I er logget ind.

Operatør-ID: Admin

Adgangskode: Jeres valgte adgangskode

