

⚠ FORSIGTIG!

- **Denne referencevejledning er ikke ment som et alternativ til at læse brugerassistancen.**

Læs brugerassistancen omhyggeligt, før instrumentet tages i brug for første gang.

cobas® click

Referencevejledning
Publikationsversion 1.0
Softwareversion 1.0

Denne publikation er en referencevejledning til **cobas® click**. For detaljerede oplysninger henvises til brugerassistancen til **cobas® click**.

Elektronisk brugerdokumentation kan hentes ved hjælp af e-tjenesten eLabDoc på navify-portalen:

<https://navifyportal.roche.com>

Kontakt din lokale servicerepræsentant, hvis du har spørgsmål eller problemer.

Der findes en liste over alle Roche-virksomheder på:

www.roche.com/about/business/roche_worldwide.htm





 Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany

Fremstillet i Japan for Roche Diagnostics.
© 2020–2024, Roche Diagnostics. Alle rettigheder forbeholdes.

COBAS CLICK, ACCU-CHEK og **NAVIFY** er varemærker tilhørende Roche.

Alle øvrige produktnavne og varemærker ejes af deres respektive indehavere.



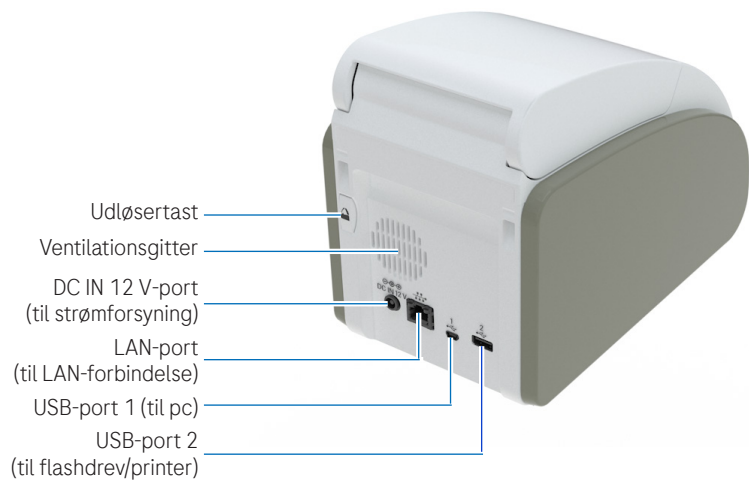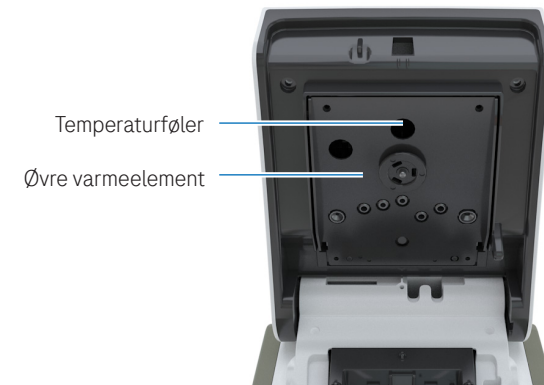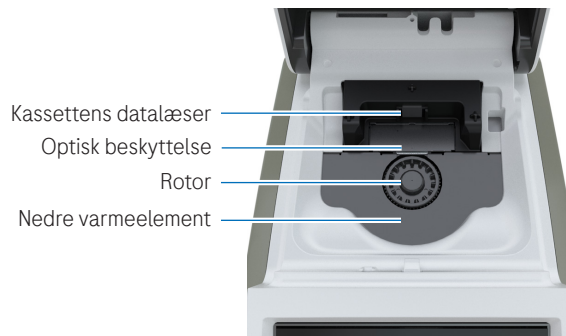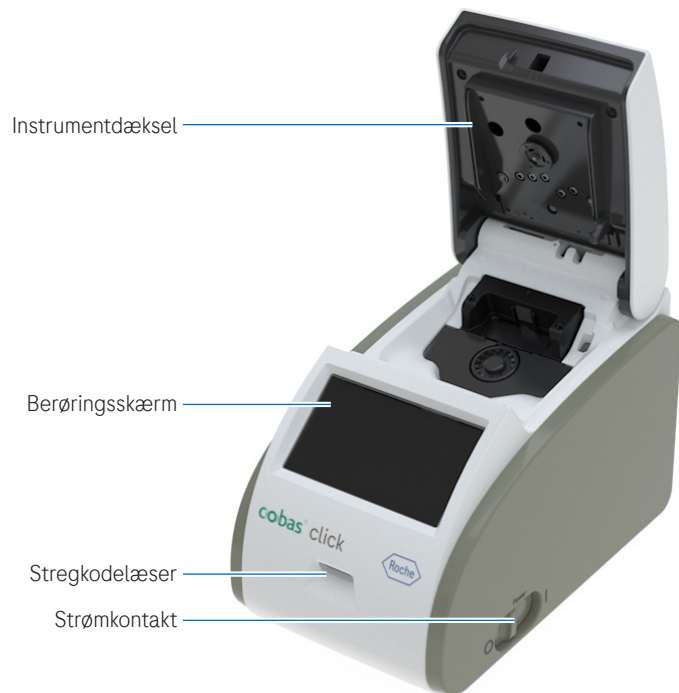

Opstart af instrumentet

1. Tænd instrumentet ved hjælp af strømkontakten i siden af instrumentet.
Instrumentet udfører automatisk egenkontrol.
2. Log på med dit bruger-id og din adgangskode.
3. Skærmen **Hovedmenu** vises.



Sådan slukkes instrumentet

1. Kontrollér, at instrumentet ikke er i gang med at analysere en prøve.
2. På skærmen **Hovedmenu** skal du vælge tasten  efterfulgt af  for at logge af.
3. Sluk for instrumentet ved hjælp af strømkontakten i siden af instrumentet.



Sådan kører du en QC-test

Nødvendigt materiale:

For hver QC-test (HbA1c, lipid, CRP):


- Kontrol, gen. 2 (niveau 1- og niveau 2-flasker)
- Værdiark (1)
- Test, gen. 2 (x2)




Bemærk:

Disse trin er de samme for alle QC-tests (HbA1c, lipid, CRP). For nemheds skyld er det ikke alle billeder og skærbilleder, der vises for hver test.


1. På skærmen **Hovedmenu** skal du vælge **QC** og derefter **QC-test**.
2. For et nyt QC-lot skal du vælge **Nyt QC-lot** eller en lot-tast for at vælge et tidligere anvendt QC-lot.
3. For et nyt QC-lot skal man scanne QR-koden på værdiarket.
4. Alternativt kan man vælge og manuelt indtaste den 32-cifrede kode, der kan findes under QR-koden på værdiarket.

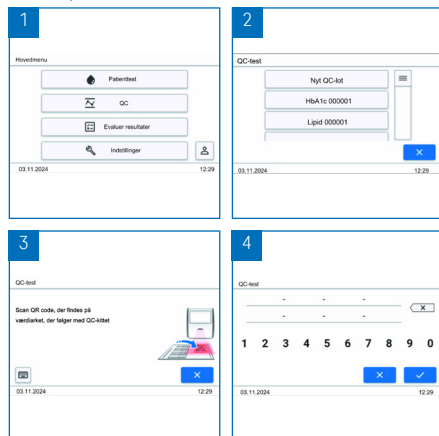


5. Targetværdierne og targetområderne for niveau 1 og 2 vises. Vælg ✓ for at bekræfte værdierne. QC-oplysningerne gemmes i systemet
6. Vælg niveauet for QC-testen (**Niveau 1** eller **Niveau 2**).

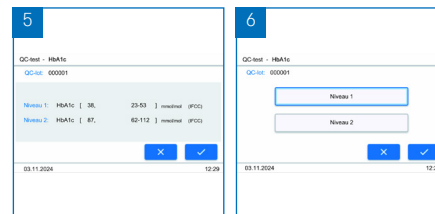

7. Åbn folieposen, og tag kassetten ud.
8. Hold kassetten korrekt. Rør ikke ved kassetts gennemsigtige overflader.
9. Åbn kassettedækslet helt.

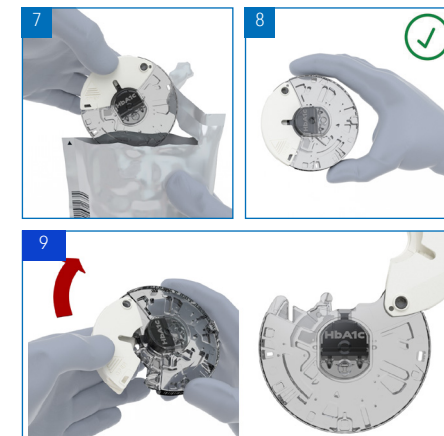


10. Kontrollér, at QC-materialet er i det korrekte niveau. Påfør forsigtigt en dråbe QC-materiale på prøveindgangen.
11. Kontrollér prøvemængden. Sørg for, at den gennemsigtige prik er helt dækket af QC-materiale.

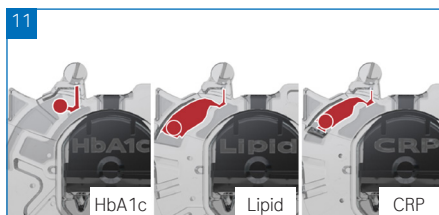


12. Luk kassettedækslet helt. Når kassetten er lukket korrekt, kan den ikke åbnes igen.
13. Følg instruktionerne på skærmen med henblik på at indsætte kassetten.
14. Sørg for, at QC-lotnummer, -parametre og -niveau svarer til **QC-lot**, **Parameter** og **Niveau**, der vises på skærmen. Vælg ✓ for at starte testen.



15. Følg instruktionerne på skærmen for at fortsætte med det næste QC-niveau.
16. Åbn den anden foliepose, og fjern kassetten. Påfør QC-materialet fra det andet niveau på den anden cassette som beskrevet i trin 8-12.
17. Vælg **Åbn** for at åbne instrumentdækslet. Fjern den første cassette. Indsæt den anden cassette, og luk instrumentdækslet.

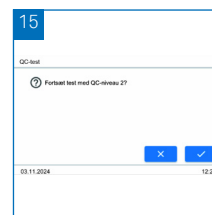

18. Sørg for, at QC-lotnummer, -parametre og -niveau svarer til **QC-lot**, **Parameter** og **Niveau**, der vises på skærmen. Vælg ✓ for at starte testen.
19. Når målingen er fuldført, vises resultaterne for begge niveauer (1+2). For at afslutte testen skal man vælge ✓, fjerne kassetten og lukke instrumentdækslet.
20. Kassér kassetterne i overensstemmelse med de relevante lokale bestemmelser.

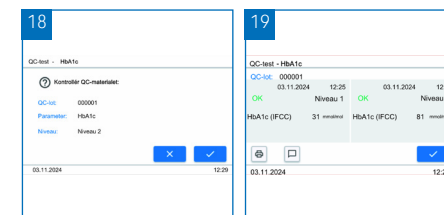

Prøveforberedelse (præanalytisk)

1. Bed patienten om at vaske hænder med varmt vand og sæbe for at fjerne fedtstoffer. Skyl fingrene grundigt for at fjerne alle sæberester.
2. Tør hænderne grundigt med papirservietter.
3. Massér fingrene for at øge blodgennemstrømningen.




Bemærk:

Som alternativ til at udføre en test med kapillært fuldblod kan man også bruge K2/K3-EDTA-antikoaguleret venøst fuldblod. Udtag blodet fra et hætteglas ved hjælp af en pipette. Bortskaf altid brugte materialer (dvs. kassetter, fingerprykkere til engangsbrug) i overensstemmelse med de lokale/institutionens bortskaffelsesprocedurer og landets sundhedsbestemmelser.



4. Tør siden på fingeren af 3 gange med en renseserviet.
5. Gentag rengøringen af fingeren med en ny renseserviet.
6. Brug steril gaze til at tørre fingeren.



7. Klargør fingerprikkeren til engangsbrug (f.eks. Accu-Chek Safe-T-Pro Plus), og indstil den til den dybeste lancetdybde.
8. Stik i den rengjorte side af fingerspidsen.
9. Tør den første bloddråbe af.

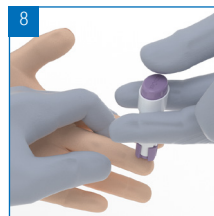

10. Tryk forsigtigt på begge sider af fingeren for at frembringe en ny dråbe. Lav en god bloddråbe på fingeren, før blodet overføres.
11. Hvis bloddråben er for lille, skal du holde den punkterede side nedad og forsigtigt trykke gentagne gange. Undgå at trykke kraftigt eller malke fingeren.

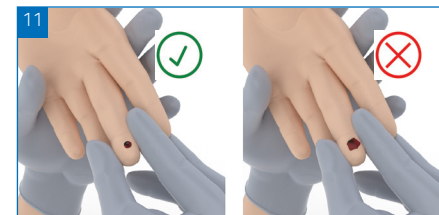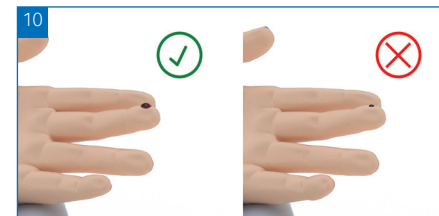

Udførelse af patienttest

1. På skærmen **Hovedmenu** skal man vælge **Patienttest**.
2. Indtast dit bruger-id og din adgangskode, hvis du bliver bedt om det.
3. Indtast patientoplysninger (f.eks. et patient-id), hvis du bliver bedt om det.




Bemærk:



Disse trin er de samme for alle patienttests (HbA1c, lipid, CRP). For nemheds skyld er det ikke alle billeder og skærbilleder, der vises for hver test.

For at forberede en blodprøve skal man følge de trin, der er beskrevet i afsnittet "Prøveforberedelse (præanalytisk)".

4. Åbn folieposen, og tag kassetten ud.
5. Hold kassetten korrekt. Rør ikke ved kassetts gennemsigtige overflader.
6. Åbn kassettdækslet helt.

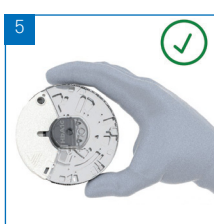

7. Placer kassetts prøveindgang over blodråben. Påfør blodet på prøveindgangen.
8. Kontrollér prøvemængden. Sørg for, at den gennemsigtige prik er helt fyldt med blod.
9. Luk kassettdækslet helt. Når kassetten er lukket korrekt, kan den ikke åbnes igen.

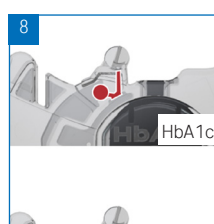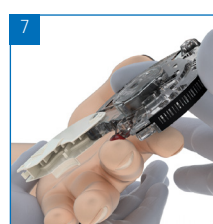

10. Indsæt kassetten med det samme.
11. Luk instrumentdækslet. Testen starter automatisk og tager ca. 4 til 6 minutter.
12. Når målingen er færdig, vises resultaterne. For at afslutte testen skal man vælge ✓, fjerne kassetten og lukke instrumentdækslet.
13. Kassér kassetterne i overensstemmelse med de relevante lokale bestemmelser.

