

cobas® click**Installationsvejledning Lægepraksis**

1. Anbring instrumentet på en plan og vibrationsfri flade. Undgå at placere det i direkte sollys.
Tilslut strømforsyningen bag instrumentet, og tænd det via knappen på højre side (flyttes fra **O** til **I**)
2. **Konfigurer indstillingerne på følgende skærbilleder**
Language: Dansk
Land: Danmark (alfabetisk liste, scroll opad)
Sommertid: Aktiveret hvis det aktuelt er sommertid, og Deaktiveret hvis det aktuelt er vintertid
Datoformat: DD.MM.ÅÅÅÅ
Dato: Aktuel dato (Dag, Måned, År)
Klokkeslætformat: 24t
Tidspunkt: Aktuelt tidspunkt (Time, Minutter)
3. **Vælg enheder på resultaterne**
HbA1c-enhed: Fravælg NGSP (%), så kun IFCC (mmol/mol) er markeret i blå
eAG-enhed: mmol/L
Lipid-enhed: mmol/L
CRP-enhed: mg/L
4. **Interfacecontroller (forbindelsesindstillinger)**
Vælg Deaktiveret

cobas click går nu i gang med selvtjek og opvarmning. Dette tager få minutter.

Når instrumentet er færdig med dette, vises skærmen **Hovemenu** og følgende aktive tast:



-
5. **Når instrumentet tages i brug første gang, skal man oprette et bruger-ID og en kode**
(som efterfølgende kan fjernes)
Vælg tasten 
Skærmen "Nyt bruger-ID" vises, og scanneren aktiveres automatisk på forsiden af instrumentet
Tryk på tastatur-ikonet nede i venstre hjørne af skærmen
Tast tallet "1" en enkelt gang og tryk på det blå vingebe
Skærmen "Ingen adgangskode registreret. Registrer adgangskoden" vises. Tryk på vingebe
Tast bogstavet "A" 12 gange og tryk på det blå vingebe
Tast igen bogstavet "A" 12 gange og tryk på det blå vingebe

6. Fjern bruger-ID-funktionen, så man ikke bliver bedt om at logge ind fremover

Tryk på menuen [Indstillinger](#)

Vælg menuen [ID-opsætning](#)

Vælg [Bruger-ID](#)

Vælg [Indtastning af ID](#)

Vælg [Nej](#), og godkend pop-up om at der skal logges af nu (tryk på det blå vingebe)

7. Mulighed for registrering af Patient-ID

Standardindstillingen på instrumentet er Nej, hvorved målinger tildeles et generisk patient-ID.

Hvis man gerne vil have mulighed for at registrere et patient-ID, kan man gøre indstillingen valgfri:

Tryk på menuen [Indstillinger](#)

Vælg menuen [ID-opsætning](#)

Vælg [Patient-ID](#)

Vælg [Indtastning af ID](#), tryk Valgfri, og tryk på vingebe

Tryk på tasten  for at vende tilbage til skærmen Hovedmenu

8. QC-test

Roche anbefaler, at der analyseres kvalitetskontroller (QC) i to niveauer, før instrumentet bruges til patientmålinger for første gang. Dette for at sikre, at instrumentet og den teknik, der anvendes til test, giver nøjagtige resultater. Der henvises til "**Sådan udføres en QC-test**" i Brugerassistancen.

cobas click er nu klar til brug.

Værd at vide - optionelle indstillinger

Det er muligt at aktivere dual-testning, hvor en HbA1c- og en lipid-kassette fyldes fra samme fingerprik, og alle resultater vises samlet efter måling af begge kassetter: Vælg [Indstillinger](#) > [Valgmuligheder](#) > [Dual-testning HbA1c+Lipid](#) > Aktiveret (standardindstilling er Deaktiveret).

Lydstyrken for tast på skærmen kan justeres: [Indstillinger](#) > [Valgmuligheder](#) > scroll ned til [Tastelyd](#) > Justér op/ned mellem 0 og 4. Hvis du vælger værdien 0, er der ingen tastelyd.

Lydstyrken for alarmer kan justeres: [Indstillinger](#) > [Valgmuligheder](#) > scroll ned til [Alarm](#) > Justér op/ned mellem 0 og 4. Hvis du vælger værdien 0, er der ingen lyd ved handlinger og alarmer/fejl.

Værd at vide - brug for hjælp

Der henvises til **cobas® click** Brugerassistance samt forbrugsvarernes metodeblade for mere information. Ved behov for support kan Roche kundesupport kontaktes på tlf. 7020 0505 (tryk 2 for Point of Care), eller via mail til kundesupport.dk@roche.com.