

iPad version

VEJLEDNING

Sådan starter du ISOeyes EyeHANDY:

Bemærk: App'en ISOeyes Eyetest kræver internetforbindelse for at fungere korrekt.

Gå til denne URL:

<https://online.isoeyes.com> fra din Safari Browser. Brug ikke Chrome til EyeHANDY App'en

Føj EyeHANDY App til hjemmeskærm

- Load URL'en og følg anvisningen på skærmen, hvor du bliver bedt om:
- "Føj til hjemmeskærm".
- Når det er gjort lukker forlader du Safari og ser din Nye EyeHandy App på din iPad's Desktop.
- Du er nu klar til at starte App'en op.
- Klik på symbolet **ISOeyes Eyetest**, som du finder på desktoppen.
- App'en loader herefter automatisk.

Registrering af serienummer

Du skal nu indtaste dit serienummer for at aktivere EyeHandy:

1. Vælg knappen "Registrering"
2. Indtast dit erhvervede serienummer og tryk "**Aktivér**"
3. Serienummeret kan kun anvendes på een enhed ad gangen, så skal det fjernes fra enheden, skal de ske i kontrolpanelet.
4. Er serienummeret ikke anvendt på anden enhed, bliver ud lukket ind og kan nu anvende EyeHANDY.

Kalibrering

Da du ikke har købt en forudkonfigureret tablet hos ISOeyes er det et par steps vi skal i gennem for at sikre det optimale testmiljø m.h.t korrekt skaleringsfaktor og lux-styrker. Dine indstillinger bliver automatisk gemt, så de skal indstilles 1 gang!

Sådan gør du::

1. Gå til **forsiden** i app'en.
2. Vælg "**Gå til klargøring...**"
3. Tryk på "**Kalibrering**"
4. Hold et kreditkort op mod skærmen og brug skyderen til at tilpasse kortets størrelse på skærmen. Når det passer, er skærmen kalibreret korrekt.

LUX VÆRDIER

Under "**Vælg din enhed**" vælger du "Apple iPad" og sætter efterfølgende din Ipad til fuld lysstyrke . Det sikrer de korrekte luxværdier til de forskellige synstest. Vigtigt at overholde dette, for et korrekt testmiljø!

