

VEJLEDNING

Sådan starter du ISOeyes tabletten:

1. Tænd tabletten

Hold tabletten vandret Hold knappen på venstre side inde, indtil tabletten starter op.

Tilslutning til WiFi:

- Klik på **indstillingssymbolet (tandhjulet)** nederst i rækken af app-symboler.
- Vælg "**Internet**" under indstillinger og opret forbindelse til det ønskede netværk.

Bemærk: App'en ISOeyes Eyetest kræver internetforbindelse for at fungere korrekt.

2.Registrering af serienummer

Du skal nu indtaste dit serienummer for at aktivere EyeHandy:

1. Vælg knappen "Registrering"
2. Indtast dit erhvervede serienummer og tryk "**Aktiver**"
3. Serienummeret kan kun anvendes på een enhed ad gangen, så skal det fjernes fra enheden, skal de ske i kontrolpanelet.
4. Er serienummeret ikke anvendt på anden enhed, bliver ud lukket ind og kan nu anvende EyeHANDY.

3. Start af App

På startskærmen:

- Klik på symbolet **ISOeyes Eyetest**, som jeg har placeret til dig.
- App'en loader herefter automatisk.

4. Kalibrering

Skærmen er allerede forudkonfigureret til korrekt skaleringsfaktor og lux-styrker,

Vil du selv prøve:

1. Gå til **forsiden** i app'en.
2. Vælg "**Gå til klargøring...**"
3. Tryk på "**Kalibrering**"
4. Hold et kreditkort op mod skærmen og brug skyderen til at tilpasse kortets størrelse på skærmen. Når det passer, er skærmen kalibreret korrekt.

LUX VÆRDIER

Din Tablet er indstillet til neutral. Vil du ændre på det er der under "**Vælg din enhed**" mulighed for at sætte til f.eks. "ISOeyes Tablet 50% skærmlys". Så sparer du på strømmen...

