



Varenummer 1999902137

Kontrolsæt, HbA1c, QuikRead Go



Produktbeskrivelse

QuikRead HbA1c kontrolsæt er påtænkt til kvalitetskontrol af Quikread go instrument, anvendes med 1 µl prøvemateriale. QuikRead HbA1c kontrolsæt indeholder 2 kontroller, med forskellige HbA1c- koncentrationer. Kontrollen er humabaseret materiale og skal behandles på samme måde som en patientprøve. Kontrollen er klar til brug, skal blandes grundigt men må ikke rystes eller vendes på hovedet. Holdbar indtil udløbsdato ved opbevaring mellem 2 - 8 grader, ved kontrol i anbrudt flaske er holdbarheden 50 dage ved opbevaring mellem 2 - 8 grader. Kontrollen kan anvendes direkte fra køleskab. Anvend kontrollen på samme måde som en ukendt fuldblodsprøve. Kontrolsættet indeholder: 1 x 0,5 ml QuikRead go HbA1c kontrol, 1 x 0,5 ml QuikRead go HbA1c high kontrol, brugsvejledning.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kontrolsæt
Varemærke	QuikRead
Vareserie	Go
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Temperatur Tolerance	+2° C til +8° C.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	7 cm	5 cm	2.5 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet skal opbevares køligt.