

Spycra Sil-Tape

SKÅNSOM FIKSERING - TIL SART OG SKRØBELIG HUD



Spycra Sil-Tape

Blød fikseringstape med silikoneklæb

Atraumatisk

Den bløde silikoneklæb sikrer effektiv og skånsom fiksering. Tapen kan fjernes atraumatisk og smertefrit. Særligt velegnet til skrøbelig hud og til børn.

Høj bærekraft

Meget blød og ganske diskret. Former sig efter konturerne.

Enkel i brug

Kan afrides uden brug af saks.

Kan foldes ud, hvis den krøller før applicering.

Kan re-positioneres ved behov for at flytte fikseringen eller ved evt. folder i tapen.

Efterlader ikke silikonerester på huden.



Indikationer:

Anvendes på intakt hud til fiksering af medicinsk udstyr, fx slanger, dræn, katetre, iltmasker, sonder, elektroder.

Anvendelse:

1. Riv den ønskede længde af rullen.
2. Placer tapen på ren og tør hud.
3. Tryk det blidt fast på huden for sikker fiksering.



Varenr.	Størrelse	Antal/æske	Antal/karton
SPY SIL-253000	2,5 cm x 3 m	1 rulle	12 æsker
SPY SIL-501500	5 cm x 1,5 m	1 rulle	12 æsker

Holdbar i 5 år efter produktionsdato.

Opbevares i beholder efter brug.

Advarsel:

I varmt vejr eller ved svedtendens kan klæbeevnen nedsættes.

Anvend ikke Spycra Sil-Tape på åbne sår/ikke intakt hud.

Anvend ikke Spycra Sil-Tape til fiksering af arterie-katetre og kanyler, da den er usteril.

Anvend ikke Spycra Sil-tape, hvor der er kendt allergi overfor silikone gel.

Læs i øvrigt instruktionen i æsken før brug.



Producent:
Reskin Medical N.V.
+32 (0)13 35 36 24
info@reskin.eu



Lyngsø Alle 3 | DK-2970 Hørsholm
Tlf.: 32 97 15 25 | info@apodan.dk | www.apodan.dk

0322