


Sorbact® Compress

Bakterie- og svampebindende sårkontaktlag

- ✓ Forebygger og behandler sårinfektioner^{1,2}
- ✓ Fjerner bakterier, svampe og endotoksiner på en sikker måde²
- ✓ Effektiv mod de mest almindelige resistente patogener³
- ✓ Kan klippes til passende størrelse og form
- ✓ Velegnet til brug i forbindelse med NPWT⁴

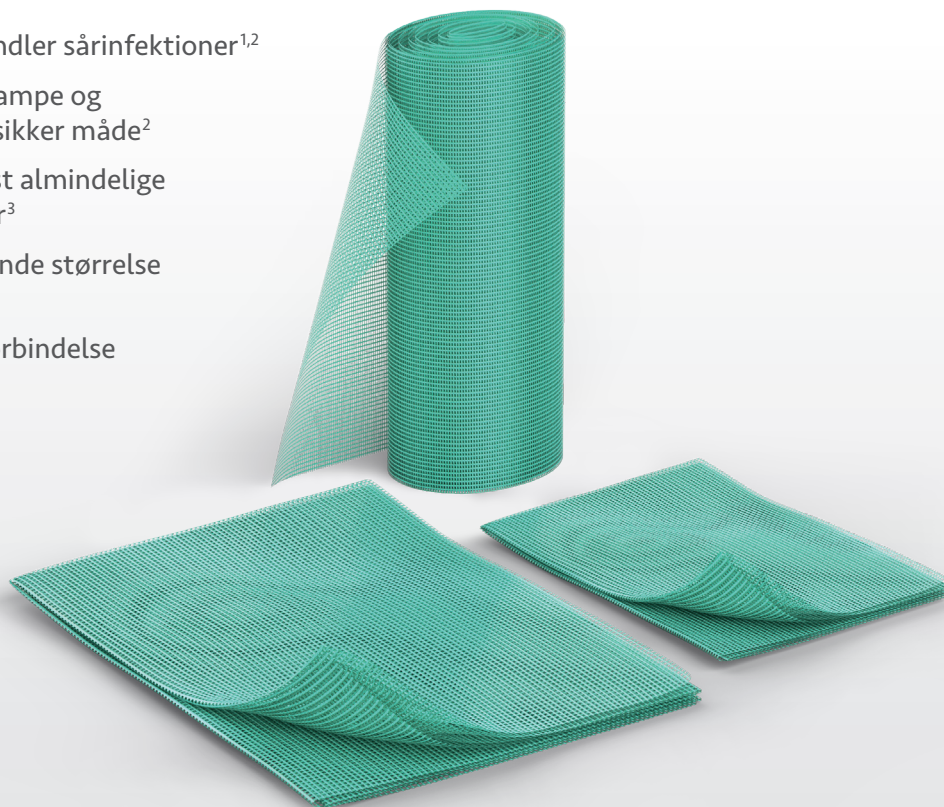

Reducerer den mikrobielle belastning i overfladiske og dybe sår

Sorbact® Compress er et DACC™-belagt, ikke-absorberende, bakterie- og svampebindende sårkontaktlag, baseret på Sorbact® Technology, der tillader passage af sårsekret til en sekundærbandage. Det kan også bruges sammen med NPWT⁴ som en liner eller sårfyldningsmateriale. Sorbact® Compress forebygger og behandler sårinfektioner og fremmer sårhelingsprocessen.

The power of safe wound infection management


Sorbact® Technology forebygger og behandler sårinfektion effektivt, hos patienter i alle aldre. Bakterier bindes irreversibelt til den DACC™-belagte overflade og fjernes sikkert. Evidens viser, at der er en antibakteriel effekt uden frigivelse af aktive stoffer, og derfor er antimikrobiel resistens ikke forventet at forekomme. Sorbact® Technology bandager bidrager til sikker og effektiv håndtering af sårinfektioner, der fremmer patientens velvære.

Anvendelse

Sorbact® Compress er velegnet til brug i behandlingen af rene, kontaminerede, koloniserede eller inficerede væskende sår, som f.eks. kirurgiske sår, traumesår, tryksår, diabetiske fod- og bensår. Sorbact® Compress kan både anvendes på overfladiske og dybe sår. Til håndtering af ekssudat bør Sorbact® Compress anvendes sammen med en sekundær bandage, der passer til ekssudatniveauet.

Brugsanvisning

1. Forbered såret og den omkringliggende hud i henhold til lokal klinisk praksis.
2. Vælg en passende bandagestørrelse til såret. Bandagen kan foldes ud til passende størrelse og kan om nødvendigt overlape sårkanterne.
3. Fjern bandagen fra emballagen med steril teknik.
4. Hvis der klippes i bandagen, anvendes steril teknik. Undgå at rive i bandagen. Kassér ubrugt bandage.
5. Læg bandagen på. Sørg for at bandagen kommer i direkte kontakt med hele såret for at tillade, at mikroorganismer kan binde sig til bandagen. Ved dybe sår udfoldes og fluffes en eller flere bandager


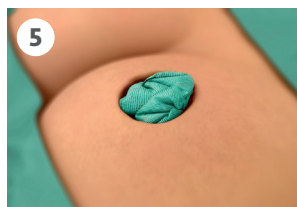


- op for at fylde såret. Undgå at udtamponere. Bandagen kan også anvendes som en liner/polstring ved kompressionsbehandling.
6. Fiksér med en sekundærbandage, der passer til ekssudatniveauet, som f.eks. en skumbandage, absorptionsbandage eller en fibergelbandage.
 7. Bandagens skiftetrekvens afhænger af sårets ekssudatniveau og den omgivende huds generelle tilstand. Hvis den kliniske tilstand tillader det, kan bandagen ligge på i op til 7 dage. Hvis bandagen klæber til såret, skal den fugtes for at lettere gøre fjernelse, og for at undgå at afbryde sårhelingen.

Sorbact® Compress er MR-sikker. Fjern Sorbact® Compress inden strålebehandling, hvis den er placeret i strålefeltet. En ny bandage kan lægges på efter behandlingen.

Brugsanvisning – i forbindelse med NPWT

1. Følg trin 1 - 5 i den forrige instruktion.
6. Hvis der bruges mere end én bandage, kontrollér da, at alle dele er i direkte kontakt med hinanden for at sikre en jævn fordeling af det negative tryk. Tæl antallet af bandager og noter det i patientjournalen.
7. Følg vejledningerne for anvendelse af NPWT-systemet.

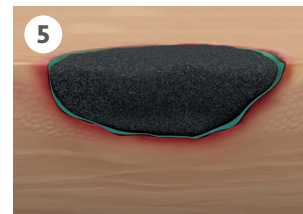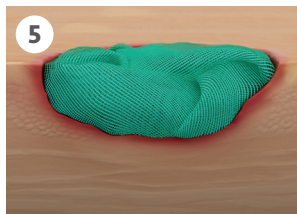

Sorbact® Compress

Varenr. bestilling	REF	Størrelse	Størrelse udfoldet	Stk. /pakke
72165-34	98128	4 x 6 cm	11 x 15 cm	40
72165-35	98125	7 x 9 cm	17 x 28 cm	40
72165-30	98124	Roll	10 x 100 cm	10



For detaljeret produktinformation, kontraindikationer, forholdsregler og advarsler, bedes den gældende brugsanvisning (IFU) læses inden brug.

1. Stanirowski PJ et al. Randomized controlled trial evaluating dialkylcarbamoyl chloride impregnated dressings for the prevention of surgical site infections in adult women undergoing cesarean section. *Surg Infect (Larchmt)*. 2016;17:427-435. 2. Kammerlander G et al. An investigation of Cutimed Sorbact as an antimicrobial alternative in wound management. *Wounds UK*. 2008;4:10-18. 3. Husmark J et al. Antimicrobial effects of bacterial binding to a dialkylcarbamoyl chloride-coated wound dressing: an in vitro study. *J Wound Care*. 2022;31:560-570. 4. Malmjö M et al. Comparison of bacteria and fungus-binding mesh, foam and gauze as fillers in negative pressure wound therapy – pressure transduction, wound edge contraction, microvascular blood flow and fluid retention. *Int Wound J*. 2012;10:597-605.

Læs mere på sorbact.dk

Sorbact® Technology bandager hjælper patienter i mere end 65 lande gennem vores varemærker Sorbact®, Cutimed® Sorbact®, Cutimed® Siltec® Sorbact®, Cutimed® Sorbion® Sorbact® og Leukoplast® Leukomed® Sorbact®.