

Former perfekt. Hver gang.

Biatain® Silicone Lite med 3DFit Technology former sig efter sårbunden, fylder hulrummet mellem sårbund og bandage, og reducerer ophobning af sårveske for optimale sårhelingsbetingelser.

- Former sig efter sårbunden
- Absorberer vertikalt
- Låser sårvesken inde

Biatain® Silicone Lite



Biatain® Silicone Lite

3DFit Technology fylder hulrummet og reducerer ophobning af sårveske



Former sig efter sårbunden

Ved kontakt med sårveske udvider og former skummen sig efter sårbunden og reducerer ophobning af sårveske.




Absorberer vertikalt

Mikrokapillærerne i skumstrukturen absorberer sårveske og blod vertikalt.

Låser sårvesken inde

Sårvesken holdes inde og retineres under kompression, således at risikoen for lækage og maceration af sårkanten og huden omkring såret reduceres.

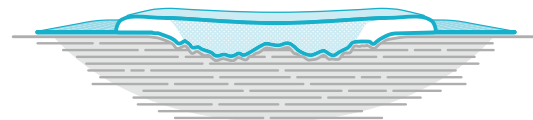

Produktopbygning

Biatain® Silicone Lite er en blød og fleksibel polyurethan skumbandage, som består af en semi-permeabel bakterie- og vandtæt topfilm, et skumlag med 3DFit Technology, et blødt silikonekontaktlag på skumpuden og silikoneklæbekant samt 3-delt berøringsfri påsættelsesfilm.

Anvendelse

Biatain® Silicone Lite anvendes til en lang række ikke-væskende til lavt væskende kroniske og akutte sår. Det omfatter bensår, tryksår, ikke-inficerede diabetiske fodsår, donorsteder, postoperative sår, skin tears og hudafskrabninger. Biatain® Silicone Lite kan anvendes under kompression og kan sidde på i op til 7 dage.

Biatain Silicone Lite

NYE
post-op
størrelser



Varenr.	Str. i cm	Pudestr. i cm	Antal i æske
33444	7,5x7,5	4,5x4,5	10
33445	10x10	6,5x6,5	10
33446	12,5x12,5	8,5x8,5	10
33452	5x5	2,2x2,2	5
33453	5x12,5	2,2x9,7	5
33456 NY	9x15	5,5x11,5	10
33457 NY	10x25	5,5x20,5	10

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

Coloplast Danmark A/S, Høtveddam 1, 3050 Humlebæk. PM-24915. 190NWC0055
www.coloplast.dk Coloplast logo er et registreret varemærke ejet af Coloplast A/S. © 2022-11. Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S.

