

# Biatain® Super

- optimal absorption til kraftigt væskende sår




Biatain Super er en superabsorberende hydrokapillær bandage, som fås i en klæbende og ikke klæbende version.

- Velgnet til kraftigt væskende sår<sup>2</sup>
- Optimalt fugtigt sårhelingsmiljø for hurtigere sårheling<sup>1-3</sup>
- En enkel alt-i-én sårbandage<sup>1</sup>



## Anvendelse

Biatain Super anvendes til behandling af en lang række væskende sår, herunder bensår, tryksår, diabetiske fodsår, 2. grads forbrændinger, kirurgiske sår og hudafskrabninger. Biatain Super er velegnet under kompressionsbehandling.

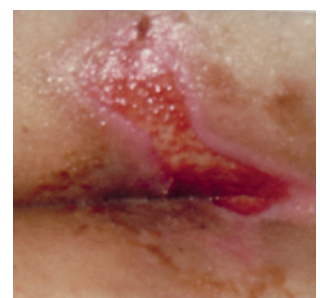

# Biatain® Super

Biatain Super er en superabsorberende hydrokapillær bandage, som opretholder et optimalt fugtigt sårhelingsmiljø til væskende sår.



## Velegnet til kraftigt væskende sår

Med hurtig absorption, distribution og retention af sårveske udnyttes bandagens fulde absorptionskapacitet med minimal risiko for maceration og lækage, også til kraftigt væskende sår.

## Optimalt fugtigt sårhelingsmiljø for hurtigere sårheling

Den hydrokapillære pude absorberer sårvesken hurtigt og vertikalt og fordeler horizontalt. Det ikke klæbende sårkontaktlag opretholder det fugtige sårhelingsmiljø.

## Alt-i-én enkel sårbandage

Sammenlignet med andre superabsorbanter, er Biatain Super en kost-effektiv løsning uden behov for ekstra fiksering eller kontaktlag.

## Virkning

Superabsorberende partikler suger og retinerer store mængder sårveske. Fibre fordeler sårvesken i puden, så absorptionskapaciteten øges. Den høje fordampnings-evne sikrer en optimal ekssudathåndtering.

## Opbygning

Biatain Super består af en superabsorberende hydrokapillær pude med en semi-permeabel topfilm, som er vand- og bakterietæt, og et ikke klæbende sårkontaktlag. Biatain Super, klæbende består desuden af en blød hydrokolloidklæber.

## Biatain Super, klæbende



## Biatain Super, ikke-klæbende

## Biatain Super, klæbende

| Vare nr. | Størrelse i cm | Pudestørrelse | Antal æske |
|----------|----------------|---------------|------------|
| 4610     | 10x10          | 6x6           | 10         |
| 4612     | 12,5x12,5      | 8,5x8,5       | 10         |
| 4615     | 15x15          | 10x10         | 10         |
| 4625     | 12x20          | 8x16          | 10         |
| 4620     | 20x20          | 14x14         | 10         |

## Biatain Super, ikke klæbende

| Vare nr. | Størrelse i cm | Pudestørrelse | Antal æske |
|----------|----------------|---------------|------------|
| 4630     | 10x10          | 6x6           | 10         |
| 4632     | 12,5x12,5      | 8,5x8,5       | 10         |
| 4635     | 15x15          | 10x10         | 10         |
| 4645     | 12x20          | 8x16          | 10         |
| 4639     | 20x20          | 14x14         | 10         |

1. Morris. British Journal of Nursing 2003; 12(10): 630-35  
2. Norkus et al. Journal of Wound Care 2005; 14(9):429-32.  
3. Karlsmark et al. British Journal of Nursing 2004; 13(6): S29-S35