




Varenummer 220262

Sårkontaktlag, Mepitel One, 7,5x5cm, med silikoneklæber, steril

- ✓ Minimerer traume og smerte ved bandagskift
- ✓ Klæber kun på den ene side for lettere applicering
- ✓ Kan blive på såret i op til 14 dage
- ✓ Omkostningseffektiv og uforstyrret sårheling

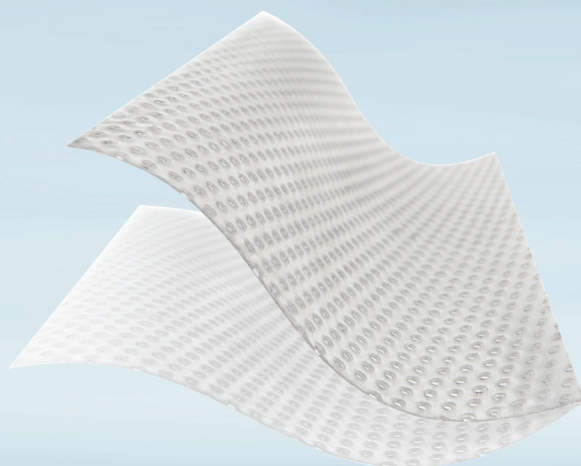

Produktbeskrivelse

Mepitel One er et sårkontaktlag af polyester belagt med silikoneklæber på den ene side. Silikoneklæberen hæfter blidt på tør hud og kan fjernes uden at strippe huden. Reducerer således smerter og traume ved forbindelskift. Silikone forseglar sårkanterne og reducerer derved risikoen for maceration. Kan ligge på såret i op til 14 dage. Kan klippes i. Fikseres med passende sekundær bandage.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sårkontaktlag
Varemærke	Mepitel
Vareserie	One
Features	Med silikoneklæber, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PAnet, med silikone
Længde/dybde	7.5 cm
Bredde	5 cm
Steriliseringsmetode	ETO
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Når Mepitel One anvendes på brandsår eller i forbindelse med ansigtsrekonstruktion kan det efterlade mærker, hvis produktet ikke anvendes korrekt. Såret skal inspiceres for tegn på infektion i henhold til gældende praksis. Ved tegn på infektion kontaktes læge. Hvis Mepitel One anvendes på Epidermolysis Bullosa patienter, skal bandageskiftene være mere forsigtige, idet klæbeevnen for Mepitel One er kraftigere end for Mepitel. Mepitel One anvendt på brandsår behandlet med transplantat: Undgå unødigt pres på bandagen. Mepitel One anvendt i forbindelse med ansigtsrekonstruktion: Undgå unødigt pres på bandagen, løft og genplacer bandagen på ny mindst hveranden dag. Når Mepitel One anvendes til fiksering af hudtransplantater og blærer, bør bandagen ikke skiftes før på femte dagen.
Holdbarhed	36 måneder fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	70 stk	19.2 cm	13 cm	15.5 cm	7323190232154
pk	10 stk	14.4 cm	12 cm	2.5 cm	7323190232161
stk	1 stk				7332430989727



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.

STERILE

Produktet er sterilt