



Varenummer 221593

## Kulbandage, Vliwaktiv AG, 15x10cm, steril, engangs

- ✓ Let absorberende kompres
- ✓ Indeholder sølv og aktivt kul
- ✓ Reducerer lugt og binder bakterier
- ✓ Kan anvendes på begge sider



### Produktbeskrivelse

Vliwaktiv AG er et let absorberende kompres, der hurtigt og effektivt absorberer sekret. Vliwaktiv AG let absorberende kompres skal primært anvendes til dybe sår i kombination med en sekundær bandage. Det antimikrobielle sølv i kombination med det aktive kul fjerner lugt fra såret og fremmer helingen ved at binde og nedbryde bakterier i bandagen. Bandagen kan anvendes på begge sider. Den bedste effekt opnås hvis kompresset har kontakt til sårbunden. Alt efter hvor meget såret væsker fikseres en sekundær bandage ovenpå.

STERILE

### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Kulbandage                                                                       |
| Varemærke                        | Vliwaktiv                                                                        |
| Vareserie                        | AG                                                                               |
| Features                         | Steril                                                                           |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Ingredienser/sammensætning       | Nonwoven, aktivt kul, sølv                                                       |
| Længde/dybde                     | 15 cm                                                                            |
| Bredde                           | 10 cm                                                                            |
| Certifikater                     | CE.                                                                              |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIb                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                                        |
| Holdbarhed                       | 5 år                                                                             |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kil   | 240 stk    | 58 cm   | 77 cm   | 20.5 cm |               |
| pk    | 10 stk     | 20.5 cm | 13.5 cm | 2 cm    | 4021447309286 |
| stk   | 1 stk      |         |         |         |               |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE