

Decuheel

Engangshælløfter mod tryksår



Produktet:

Decuheel hælaflastning er luftfyldt, hvilket bevirker at trykfordelingen er optimal og luften fordeler sig automatisk. Decuheel fordeler trykket på hæl og læg.

Decuheel er fremstillet af en solid og miljøvenlig plasttype, og er beklædt med et miljø- og allergivenlig stof på indersiden, der øger komforten.

Der medfølger en plast pind til regulering af luftmængden i Decuheel.

Decuheel kan nemt rengøres med en fugtig klud, sprit eller klorhexidin.

Pumpe til Decuheel købes separat.

Anvendelse:

Decuheel anvendes både til behandling og til forebyggelse af tryksår.

Decuheel pustes ca. $\frac{3}{4}$ op og placeres på patientens fod og lukkes herefter med de 2 velcrobånd.

Sortiment Decuheel:

One Size

Indhold

1 stk. + pind
10 stk. + pind
1 pumpe

REF

Decuheel
Decuheel stk. 10
Pumpe

Starterkit:

2 stk. + pind +
1 stk. pumpe

DecuKit