



DECUMED APS
THEKLAVEJ 2
KØBENHAVN
DK - 2400 NV

T +45 35 307 007
F +45 35 307 009
CVR 32 083 560

INFO@DECUMED.COM
WWW.DECUMED.COM

decumed
The cure is care

Version 10 05 / A4



Batchnummer: Se label på enkeltstyks pakningen



Anvendes senest: Se label på enkeltstyks pakningen



Læs brugsanvisningen



Må ikke genbruges







Må ikke opbevares i sollys



Opbevaring: Max 25 grader C

decuheel™  CE

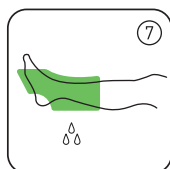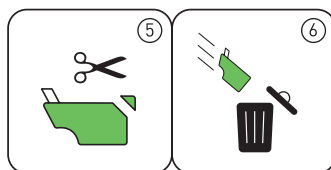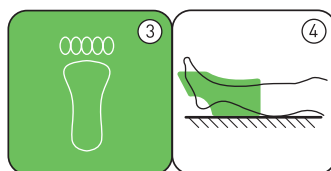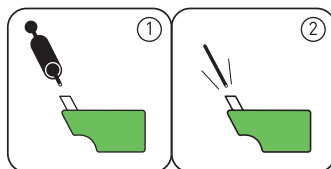

VAPODRAIN™

Brugermanual Decuheel oppustelig engangshælløfter

Hælløfteren må kun anvendes til forebyggelse af hælsår og elevation af hæl.

- 1 Hælløfteren udfoldes. Pumpespids indføres i den selvlukkende ventil. Hælløfteren pumpes op med håndpumpe eller maskinelt til den ønskede hårdhed. Alle celler skal være luftfyldte.
- 2 Trykket i hælløfteren kan sænkes ved hjælp af det medfølgende rør, der forsigtigt indføres i ventilen, så luft lukkes ud indtil ønsket hårdhed er opnået.

Hælløfteren er nu klar til anvendelse.

Anbring patientens fod i den oppustede hælløfter.

- 3 Fodsålen skal hvile mod den del, der er markeret med en tegnet fod på hælløfteren. Læggen skal bæres af den store luftfyldte del i bunden.

Bændlet lukkes. OBS: Bændlet må ikke stramme.

- 4 Hælen skal være løftet over underlaget (madrasen). Juster lufttrykket så den korrekte løftehøjde af hælen opnås (1-2 cm), dette kan ske mens patientens ben bliver liggende i hælløfteren.
- 5 Før bortskaffelse kan hælløfteren punkteres, f.eks. ved afklipping af et hjørne.
- 6 Bortskaffes som almindelig dagrenovation.
- 7 Hælløfteren bruges direkte mod huden, da den er lavet af et plastmateriale med Vapodrain-teknologien, der transporterer fugt, så huden altid er tør.

Hælløfteren er patientspecifik og kun til engangsbrug. Ved tilsmudsning af hælløfteren skal den erstattes af en ren hælløfter eller rengøres med en fugtig klud, med sprit eller med klorhexidin.

Indeholder ikke ftalater.

- ⚠ Advarsel: Ved for højt tryk i hælløfteren kan den bryde med højt lydtryk til følge.
- ⚠ Hælløfteren må kun fyldes med atmosfærisk luft.
- ⚠ Fyldning af hælløfteren med andre luftarter kan medføre brandfare.
- ⚠ Hælløfteren er ikke beregnet til kontakt med sår på grund af infektionsrisiko.
- ⚠ Vedligehold altid korrekt tryk i hælløfteren. Ved manglende tryk i hælløfteren er der risiko for at tryksår kan opstå.
- ⚠ Hælløfteren må kun anvendes i oppustet tilstand.
- ⚠ Bør ikke anvendes i nærheden af åben ild.

Defekte hælløftere skal straks kasseres.