

Propulse Ear Irrigator

Rengøringsinstruktioner

Rengøring

Forsøg ikke at rengøre Propulse® QrX™ Tip. Brug en Propulse® QrX™ Tip pr. behandling og kassér den som klinisk affald efter brug, da dette reducerer risikoen for krydskontaminering mellem patienter.

Ekstern rengøring af Propulse® Ear Irrigator skal udføres manuelt ved at tørre den af med en fugtig klud. Påfør væsker på kluden, ikke på enheden. Dyp ikke enheden i vand. Milde rengøringsmidler og desinfektionsmidler kan bruges eksternt.

Rengøringsinstruktioner

Betydningen af at bruge den korrekte styrke af rengøringsmiddel kan ikke overvurderes. En opløsning, der er for stærk, vil over tid beskadige Propulse® Ear Irrigator. En opløsning, der er for svag, vil ikke give den korrekte grad af rengøring og dekontaminering. Mirage Health Group anbefaler brug af Propulse® CHLOR-CLEAN® Tabletter. De er lette og effektive at bruge og giver en målt/specificeret styrke af rengøringsmiddel, der er sikker og skånsom mod Propulse®'s interne komponenter.

Sørg for, at enheden er blevet rengjort inden første brug.

1. Hæld lunkent vand i beholderen op til vandret linje på forsiden (G5 & PP17) eller 500 ml mærket (II, III & NG).
2. Læg en Propulse® CHLOR-CLEAN® tablet i beholderen og lad den opløse helt.
3. Når den er opløst, kørs maskinen, indtil rengøringsopløsningen forlader håndtaget. Dette sikrer, at rengøringsopløsningen har nået alle de interne komponenter.
4. Lad opløsningen være på plads i 10 minutter.
5. Efter 10 minutter fjernes beholderen med den resterende rengøringsopløsning, og den kasseres.
6. Fyld beholderen med rent, veldrevet, koldt vand og returner den til Propulse®.
7. Kørs Propulse®, og sørg for, at al resterende rengøringsopløsning er skyllet igennem.
8. Fjern beholderen, kassér vandet og tør beholderen grundigt med et stykke køkkenrulle.
9. Returner beholderen til Propulse® - den er nu klar til brug.

Bemærk venligst

Skader forårsaget på din Propulse Ear Irrigator ved ikke at bruge det anbefalede rengøringsmiddel vil ugyldiggøre din garanti. Andre instrumenter brugt med Propulse bør rengøres i henhold til lokale retningslinjer.