


Manchetter

Til Microlife blodtryksmålere

At bruge den rigtige manchet er mindst lige så vigtigt som selve blodtryksmåleren. Den rigtige manchetstørrelse og dens form er begge centrale elementer i en nøjagtig blodtryksmåling.

Derfor findes der på alle Microlifes manchetter et indeksområde, der hjælper dig med at se, om manchetten har den korrekte størrelse.

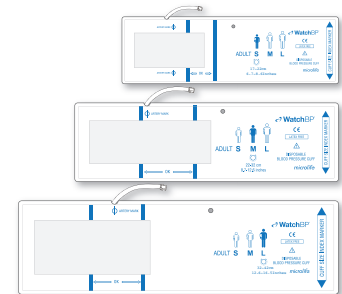

Et komplet manchetsortiment til alle Microlife blodtryksmålere

Microlifes manchetter er tilgængelige som både en-patients- og flergangsmanchetter (Soft), samt manchetter til WatchBP.

Størrelse/mål i cm	S/17-22 cm	M/22-32 cm	L/32-42 cm	M-L/22-42 cm	L-XL/32-52 cm
En-patientsmanchet	X	X	X		
Flergangsmanchet (Soft)	X	X	X	X	X
WatchBP manchet*	X	X	X		X

*Ankelmanchet i str M (22-32 cm) og L (32-42 cm) findes til WatchBP Office ABI.

Rengøring af manchet

Manchet til WatchBP blodtryksmålere

1. Fjern pumpeblæren.
2. Fold og læg manchetovertækket i en vaskpose.
3. Vask manchetovertækket i varmt vand (40 °C) med lidt mild sæbe i vaskemaskinen.

Varmebehandling:

Vask manchetovertækket i 75 °C varmt vand i 30 minutter.

Manchet til andre blodtryksmålere

1. Fjern manchetkonnektoren fra manchetslangen og træk forsigtigt pumpeblæren gennem åbningen ved kanten af manchetdækslet.
2. Håndvask manchetovertækket i sæbevand, ikke varmere end 30 °C.
3. Tør manchetovertækket ved lufttørring.
4. Træk manchetslangen gennem åbningen og placér inderdelen af manchetten fladt i manchetovertækket.
5. Montér manchetkonnektoren igen på manchetslangen.

Obs: Inderdelen af manchetten skal være placeret fladt i manchetovertækket og må ikke være foldet. Brug ikke skyllemiddel.