


Clinitek Status +[®]

Urinstixvejledning

siemens-healthineers.com/dk

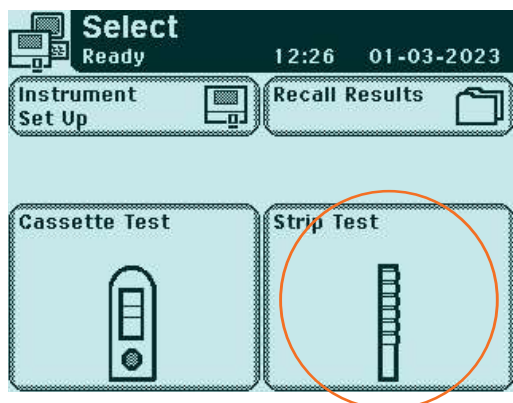

Urinprøven skal være frisk og velblandet

Har urinprøven været på køl, bør den have stuetemperatur inden analysering

- Vælg Strip Test
- Tryk på Enter New Patient
- Indtast CPR nr. eller navn og tryk Enter (Husk at beskytte personfølsomme oplysninger)
- Tag en urinstix ud af beholderen, skru låget på igen.



Indenfor 8 sekunder udføres følgende:

- Tryk Start (8 sek. nedtælling starter)
- Dyp en urinstix *hurtigt* i urinprøven, dyp alle felterne, ID bånd undtaget
- Træk urinstix langs kanten af beholder, når den tages op og dup siden af stixen mod et stykke cellostof eller lignende
- Placer stixen på slædeindsatsen.



Apparatet aflæser stixen og tæller ned

- Resultatet udskrives og vises på skærmen
- Tryk "DONE" for at komme tilbage til start
- Stixen kasseres og slædeindsatsen aftørres med en spritswab. Spritswabben må ikke indeholde klorhexidin eller glycerol.



For fuld dokumentation henvises til Clinitek Status+ Brugervejledning. Brugervejledningen kan downloades på Document Library <https://doclib.siemens-healthineers.com/home> Multistix indlægsseddel (AN30429L) Revideret 05-2023 JNC