



Varenummer 280083

Kontrol, Hb, til 20 µl kapillærrør, QuikRead, 1 ml, kølevare, 20 g



Produktbeskrivelse

HB Control er påtænkt til kvalitetskontrol af HB analysen af Quikread go instrument. Anvend kontrollen på samme måde som en ukendt fuldblodsprøve. Kontrollen er klar til brug, skal stabiliseres ved stuetemperatur i min. 30 minutter, blandes grundigt men ikke rystes. Holdbar uåbnet indtil udløbsdato hvis den opbevares ved 2 - 8 grader celsius. Holdbar åbnet 1 måned hvis den opbevares ved 2 - 8 grader celsius. Kontrollen stammer fra kvæg og skal behandles på samme måde som en patientprøve. Resultatet bør være inden for området, vist på kontrolflaskens etikette. Kontrollen udføres på samme måde som patienttest. Denne HB kontrol anvendes med 20 µl prøvemateriale.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kontrol
Varemærke	QuikRead
Features	Kølevare
Længde/dybde	3.2 cm
Bredde	3.2 cm
Højde	6.8 cm
Vægt, netto	20 g
Vægt, brutto	20 g
Rumindhold, netto	1 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Temperatur Tolerance	+2° C til +8° C.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	3.2 cm	3.2 cm	6.8 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet skal opbevares køligt.