


microlife®

BEKRIVELSE AV DETTE TERMOMETERET
BEKRIVELSE AF DETTE TERMOMETER

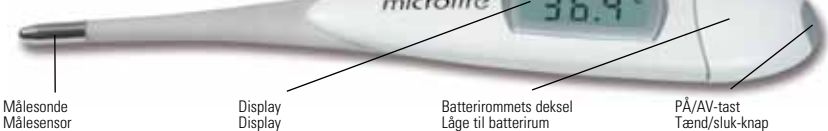

 **Læs instruksjonene nøye før denne varmeputen tas i bruk.**
Læs instruktionerne omhyggeligt før brug af enheden.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Instrumentet er utelukkende beregnet til måling av kroppstemperatur.
- Den korteste tiden før det høres et lydsignal må overholdes uten unntak.
- Sørg for at barn ikke bruker instrumentet uten tilsyn, fordi noen deler er så små at de kan svelges.
- Beskytt instrumentet mot støt og fall.
- Spissen må ikke bøyes mer enn 45 °.
- Unngå temperaturer over 60 °C. **Kok aldri termometeret.**
- Bruk bare vanlige desinfeksjonsmidler som er oppgitt i avsnitt «Rengjøring og desinfisering» til rengjøring av instrumentet. Instrumentet må være intakt når det senkes ned i flytende desinfeksjonsmidler.
- Produsenten anbefaler at termometeret blir etterkontrollert med 2 års mellomrom.



Batterier og elektroniske apparater må kasseres i samsvar med lokale forskrifter, men ikke sammen med husholdningsavfall.

NO

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Instrumentet må kun anvendes til at måle kropstemperatur.
- Minimumsmåletiden - indtil signalet (bipet) lyder - skal overholdes uden undtagelse.
- Sørg for at barn ikke anvender instrumentet uden opsyn, da nogle dele er små nok til at kunne sluges.
- Instrumentet skal beskyttes mod støt og slag.
- Undgå at bøje spidsen mere end 45 °.
- Den omgivende temperatur bør ikke overskride 60 °C. Instrumentet må **IKKE** koges.
- Brug kun desinfeksjonsmidler, der er nævnt under punktet, når instrumentet renses. Når instrumentet placeres i den desinficerende væske, skal det være intakt.
- Producenten anbefaler at lade et autoriseret laboratorium justere målenøjagtigheden hvert andet år.

DA



Batterier og elektroniske instrumenter skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokalt gældende regler. Altså ikke sammen med husholdningsaffald.

SLÅ PÅ TERMOMETERET

For å skru på termometeret trykk knappen på oversiden. Et kort signal indikerer at termometeret er satt på, samtidig testes displayet og alle funksjoner kontrolleres. Alle segmenter skal vises. Hvis romtemperaturen er under 32 °C, vises en «--» og en blinkende «*C» i displayet. Termometeret er nå klart til bruk.

BRUK AV TERMOMETERET

Velg anbefalte målemetode. Den oppmålte temperaturen vises kontinuerlig i displayet og bokstaven «*C» blinker under målingen. Dersom lydsignalet høres 10 ganger og «*C» ikke lenger blinker, målingen er avsluttet og temperatur kan nå avleses. For å spare på batteriet kan termometeret slås av med et kort trykk på PÅ/AV-tasten. I mot-satt fall vil termometeret automatisk bli slått av etter cirka 10 minutter.

MÅLEMETODER

I munnen (oralt)

Plasér termometeret i en av de to hulrommene under tungen, i venstre eller høyre side av tungens bakkant. Målesonden må ha god kontakt med vevet. Lukk munnen og pust jevnt gjennom nesen for å unngå at målingen blir påvirket av luft som suges inn og blåses ut.

Måletid cirka: 20 sekunder.

I anus (rektalt)

Dette er den mest pålitelige målemetoden, og den egner seg spesielt for barn og småbarn. Termometerets målesonde føres forsiktig 2 til 3 cm inn i anallåpningen.

Måletid cirka: **10 sekunder!**

I armhulnen (aksillært)

For å oppnå mer pålitelige resultater anbefaler vi å måle temperaturen oralt eller rektalt. Cirka måletid: 20 - 90 sekunder etter pipetone (avhengig av lufttemperatur).

MINNEFUNKSJON

Hvis du holder strømbryteren inne minst 3 sek i det du slår på termometeret, vises den siste målte temperaturen i displayet. En «M» vises samtidig i høyre del av displayet. Den senest målte temperaturen og «M» forsvinner etter ca. 3 sek., og termometeret er klart for ny måling.

RENGJØRING ELLER DESINFEKSJONS

Betegnelse: Isopropylalkohol 70 %; nedsenket: maks. 24 timer.

SKIFTE AV BATTERI

Når «▼» vises i displayets nederste høyre hjørne, må batteriet skiftes ut. Sett et nytt batteri av typen LR41 1.55V i batteriholderen, og forsikre deg om at batteriet er på plass. Skryv batteriholderen på plass og sett på låkett.

	TEKNISKE DATA	Tekniske spesifikasjoner
Type / Type:	Maksimumtermometer	Maksimum termometer
Temperaturspekter / Måleområde:	32.0 – 42.9 °C Temp. < 32.0 °C markeres i displayet med «--» (lav) og Temp. > 42.9 °C markeres i displayet med «H» (høy)	32.0 °C til 42.9 °C Temp. < 32.0 °C: display «--» for «low» (for lavt) Temp. > 42.9 °C: display «H» for «high» (for højt)
Toleranse / Målenøjagtighed:	± 0.1 °C mellom 34 °C og 42 °C	± 0.1 °C mellem 34 °C og 42 °C
Arbeidstemperatur/ Anvendelsestemperatur:	10 °C og 40 °C; 15 - 95 % relativ maksimal fuktighet	10 °C til 40 °C; 15 - 95 % max. relativ fugtighed
Selvtest / Selvtst:	Termometeret kontrollerer automatisk testverdien for 37.0 °C. Et avvik >0.1 °C vises med «ERR» i displayet.	Automatisk intern kontrol med en testverdi på 37.0 °C; hvis der konstateres en afvigelse på >0.1 °C, vises der «ERR» (error).
Display / Display:	Liquid crystal display (LCD) med 3 desimaler. 0.1 °C er minste desimal.	Display med flydende krystaller (LCD) med 3 cifre, mindste enhed i displayet: 0.1 °C
Signal / Signaltone:	Signaliserer at termometeret er klart til bruk og at temp.stigning er mindre enn 0.1 °C / 8 sek.	Til at signalisere at termometeret er klart til brug og at temperaturstigningen er mindre end 0.1 °C i løbet af 8 sekunder.
Minne / Hukommelse:	Sist målte verdi	Til at gemme den sidst målte værdi.
Oppbevaringstemperatur / Oppbevaringstemperatur:	-25 °C til +60 °C; 15 - 95 % relativ maksimal fuktighet	-25 °C til +60 °C; 15 - 95 % max. relativ fugtighed
Batteri / Batteri:	1.5/1.55 V; LR 41	1.5/1.55 V; LR 41
Referanse til standarder/ Reference til standarder:	EN 12470-3, kliniske termometre; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)	EN 12470-3, kliniske termometre; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)

Dette apparatet oppfyller kravene til Rådsdirektiv om medisinsk utstyr 93/42/EEC. Det tas forbehold om tekniske endringer.

GARANTI

Produktet har 2 års kjøpsgaranti. Skader forårsaket av feilbruk dekkes ikke av garantien. Batterier og emballasje dekkes heller ikke av garantien. Alle andre erstatningskrav fraskrives. Krav mot garantien må fremsettes sammen med kvittering på kjøp. Send det defekte termometeret godt innpakket sammen med tilstrækkelig porto til:

Kjøpsdato:

Denne enhed overholder kravene i det Medicinske Udstyr Direktiv 93/42/EEC. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

GARANTI

Vi giver en 2 års garanti efter købsdatoen. Skade forårsaget som følge af upassende håndtering er ikke omfattet af garantien. Batterier og emballage er ligeledes ikke omfattet af garantien. Vi fralægger os ethvert andet ansvar. Et eventuelt erstatningskrav skal indsendes sammen med købskvitteringen. Sørg for, at det defekte termometer er pakket forsvarligt ind og afsendt med tilstrækkelig porto:

Købsdato: