



Varenummer 291132

## Uridom, Pop-On, 5cm, Ø32mm, klar, klæbeflade 3,8 cm

- ✓ Af silikone, som sikrer at huden kan ånde
- ✓ Kinkfrit og effektivt afløb
- ✓ Selvklæbende design



### Produktbeskrivelse

Pop-On er et selvklæbende uridom af 100% silikone i en kortere længde. Silikonen sikrer at huden kan ånde, hvorved risikoen for hudgener minimeres. Uridomet er designet med et kinkfrit og effektivt afløb.



### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Uridom                                                                           |
| Varemærke                        | Pop-On                                                                           |
| Farve                            | Klar                                                                             |
| Features                         | Klæbeflade 3,8 cm                                                                |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Materiale                        | Silikone                                                                         |
| Længde/dybde                     | 5 cm                                                                             |
| Diameter                         | 32 mm                                                                            |
| Certifikater                     | CE. MD.                                                                          |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse I                                                                         |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                                                |
| Holdbarhed                       | Ifølge udløbsdato                                                                |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

### Brugsanvisning

Uridomer anvendes til inkontinente mænd. Før påsætning rengøres huden, og håret fjernes, da klæberen er stærk. Huden skal være helt tør inden påsætningen af et nyt uridom. Efter påsætning forbindes uridomet til en urinpose. Uridomet skal skiftes mindst én gang dagligt med soining. Husk at tjekke størrelsen inden produktet tages i brug.

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde   | Bredde  | Højde   | EAN            |
|-------|------------|----------|---------|---------|----------------|
| kll   | 300 stk    | 102.5 cm | 22.5 cm | 29.5 cm | 20801741070567 |
| pk    | 30 stk     | 28.2 cm  | 20.2 cm | 11 cm   | 10801741070560 |
| stk   | 1 stk      |          |         |         |                |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet indeholder ikke latex.